


tobii
dynavox

TD Snap Kommunikations-
App Neuerungen




Was ist TD Snap?

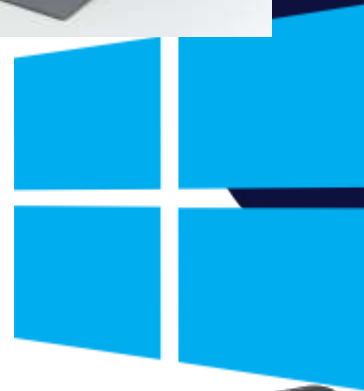

Was ist TD Snap

- Kommunikations-App für iPadOS und Windows
- Unterstützt sämtliche Auswahlmethoden
 - Berühren
 - Loslassen
 - Scanning
 - Auditives Berühren
 - Maussteuerung
 - Augensteuerung
- Enthält Symbolsysteme
 - METACOM
 - PCS
- Sämtliche Acapela Kinder- und Erwachsenen-Stimmen sind enthalten.
- Inhalte lassen sich auch ausdrucken.




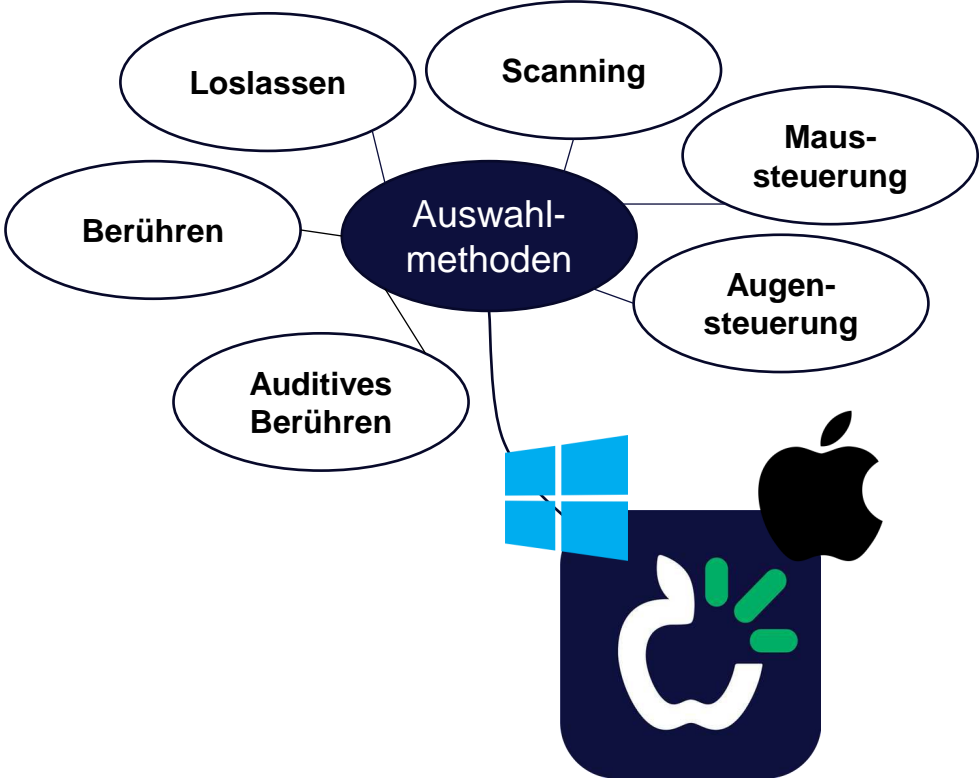

Neue Auswahlmethode



- Auditives Berühren

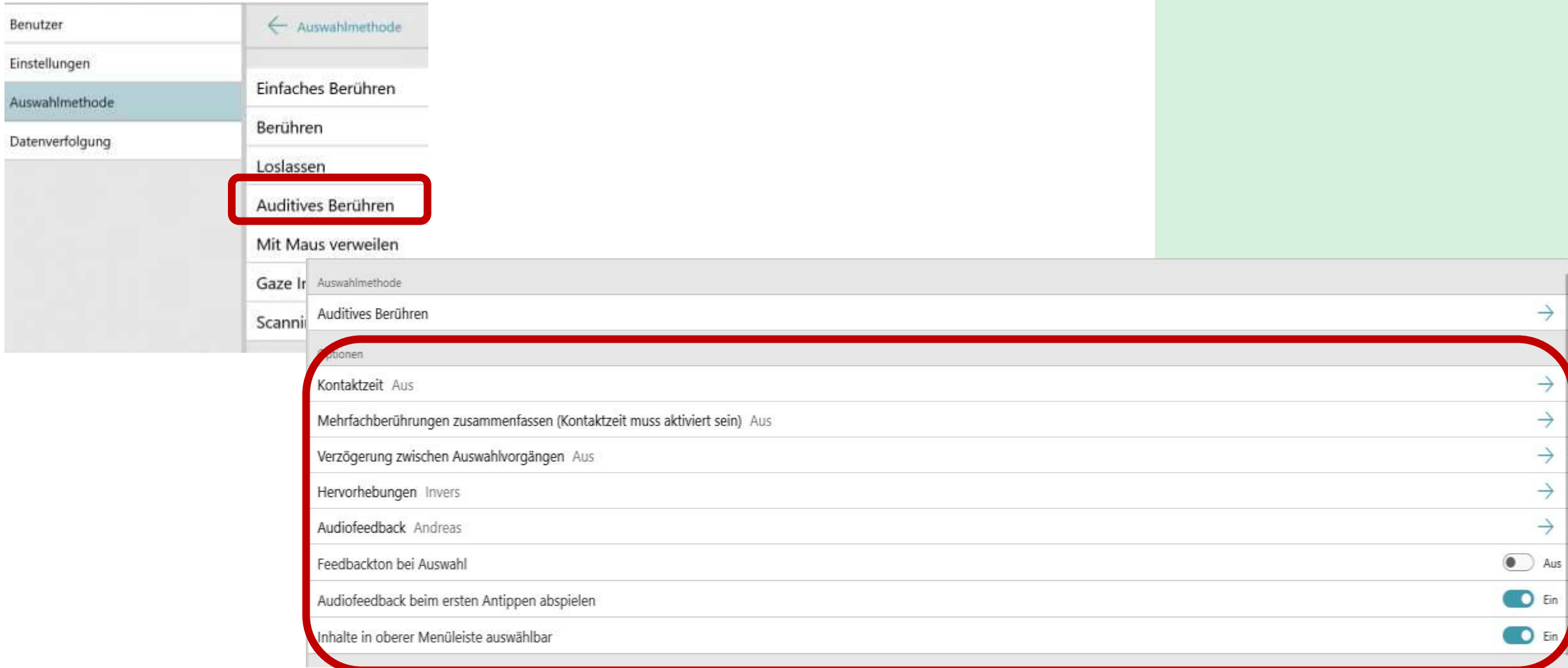

The screenshot displays the 'Auswahlmethode' (Selection Method) settings in Tobii Dynamox. The 'Auditives Berühren' (Auditory Touch) option is selected and highlighted with a red box. Below this, a detailed settings panel for 'Auditives Berühren' is shown, also highlighted with a red box. This panel includes the following settings:

- Auswahlmethode: Auditives Berühren
- Optionen:
 - Kontaktzeit: Aus
 - Mehrfachberührungen zusammenfassen (Kontaktzeit muss aktiviert sein): Aus
 - Verzögerung zwischen Auswahlvorgängen: Aus
 - Hervorhebungen: Invers
 - Audiofeedback: Andreas
 - Feedbackton bei Auswahl: Aus
 - Audiofeedback beim ersten Antippen abspielen: Ein
 - Inhalte in oberer Menüleiste auswählbar: Ein

Neue Auswahlmethode

- Auditives Berühren




Beim Auditiven Berühren berührt man ein Feld auf dem Bildschirm und erhält jeweils ein Audiofeedback, das Identifizierung und Auswahl der Felder erleichtert.

Diese Auswahlmethode kann so angepasst werden, dass man entweder durch Berühren und Ziehen Audiofeedback abrufen und dann den Finger vom Bildschirm abheben und auswählen kann.





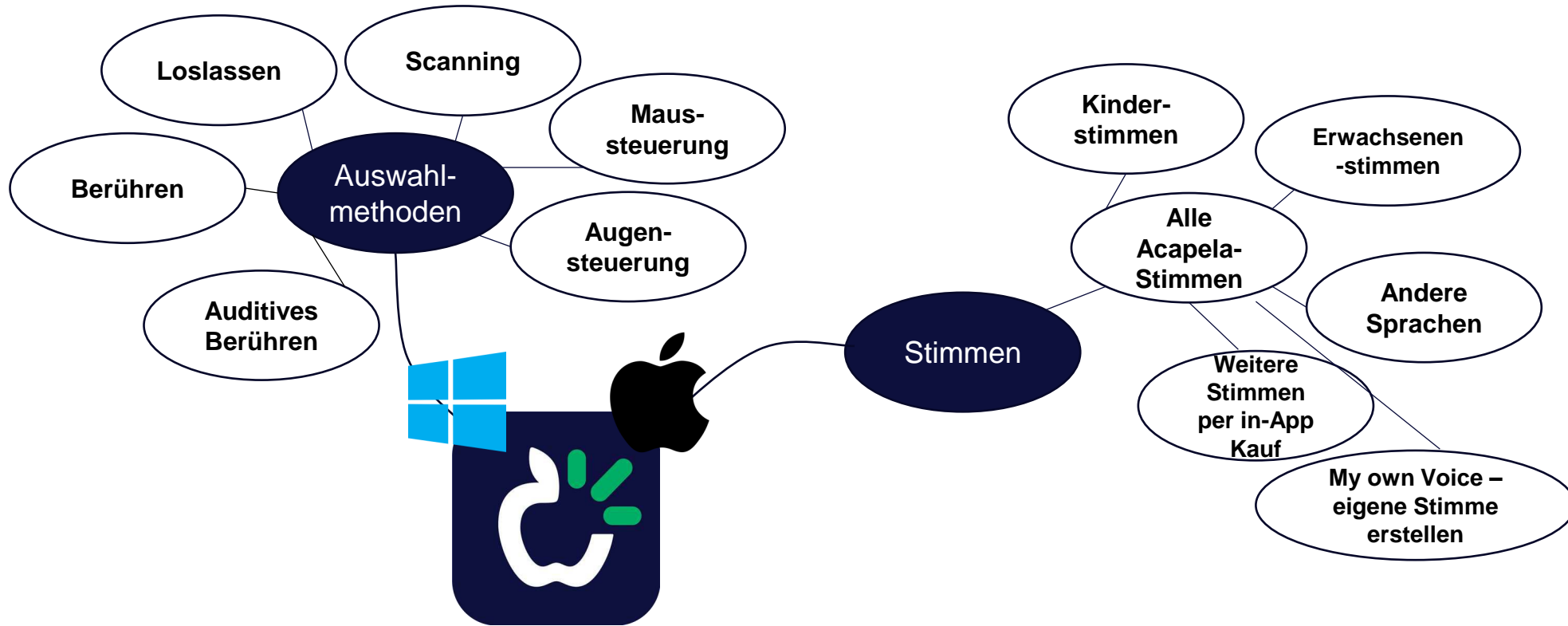

















Oder man tippt einmal, hört das Audiofeedback und tippt erneut zum Auswählen.

Diese Auswahlmethode kann von Personen mit visuellen Einschränkungen genutzt werden oder von Personen, die mit Audiofeedback besser zurecht kommen.





Stimmen in TD Snap

- Alle bei Acapela verfügbare Stimmen
 - Kinderstimmen
 - Erwachsenenstimmen
 - Weitere Sprachen
- Windows oder iPad Stimmen
- Weitere Stimmanbieter per in-app-Kauf möglich
 - Cerence 47,99€
- Stimmen können angepasst werden
 - Stimmlage
 - Geschwindigkeit
 - Lautstärke
- Ausspracheausnahmen möglich


← Benutzer	
Installiert	
	  Lea Deutsch (Deutschland), Weiblich, Kind, Acapela
	  Claudia Deutsch (Deutschland), Weiblich, Erwachsener, Acapela
	  Julia Deutsch (Deutschland), Weiblich, Erwachsener, Acapela
	  Jonas Deutsch (Deutschland), Männlich, Kind, Acapela
	  Andreas Deutsch (Deutschland), Männlich, Erwachsener, Acapela
	  Klaus Deutsch (Deutschland), Männlich, Erwachsener, Acapela
	  Rasmus Dänisch, Männlich, Erwachsener, Acapela
	 ..

Neue Stimmen in TD Snap

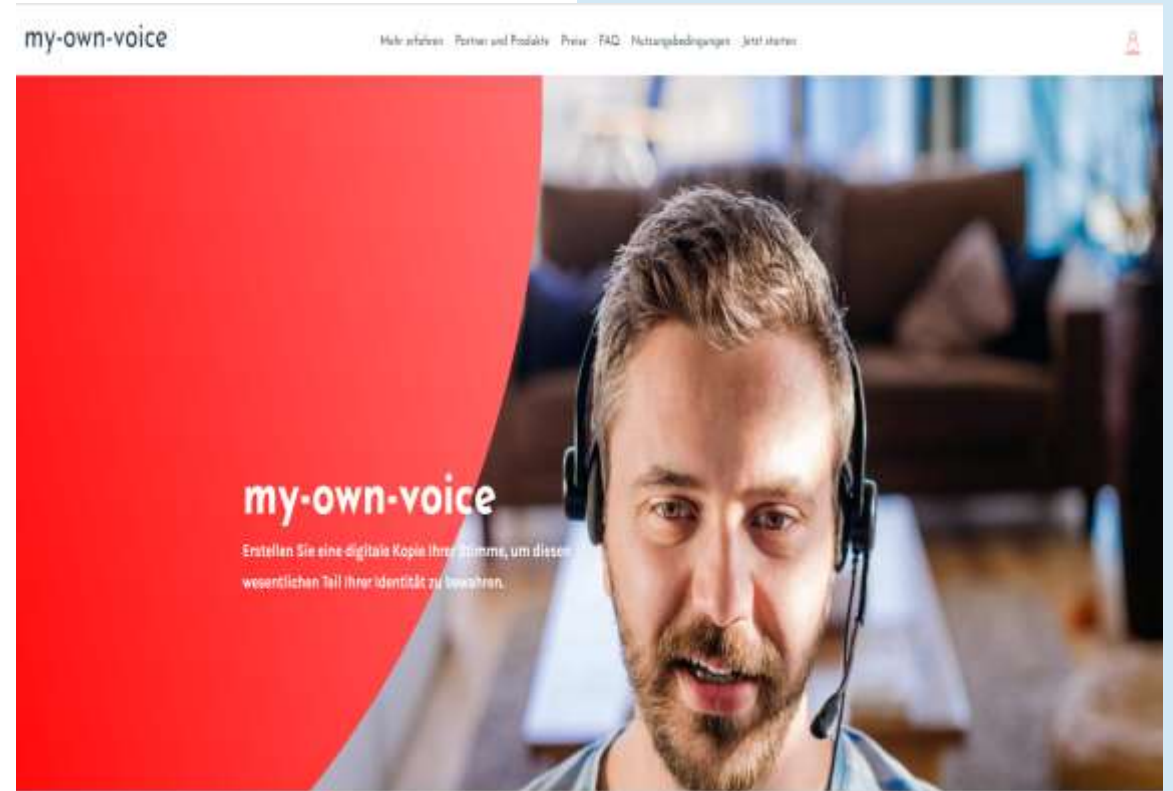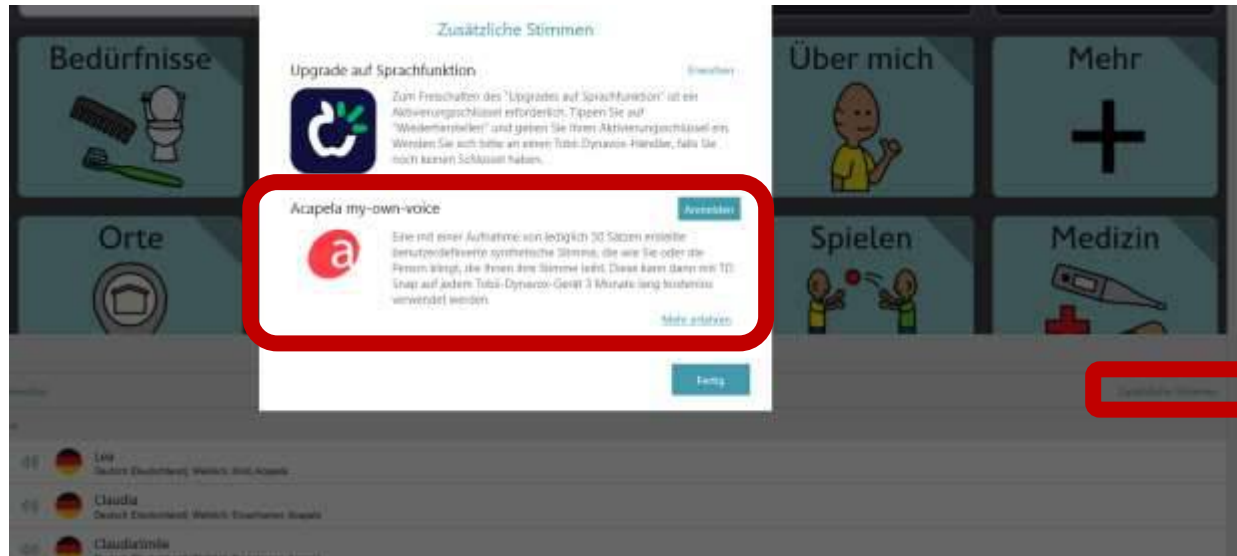

Mit *my-own-voice* eine eigene synthetische Stimme erstellen, mit nur 50 Sätzen die gesprochen werden.

Stimme kann **kostenlos** 3 Monate in TD Snap ausprobiert werden!

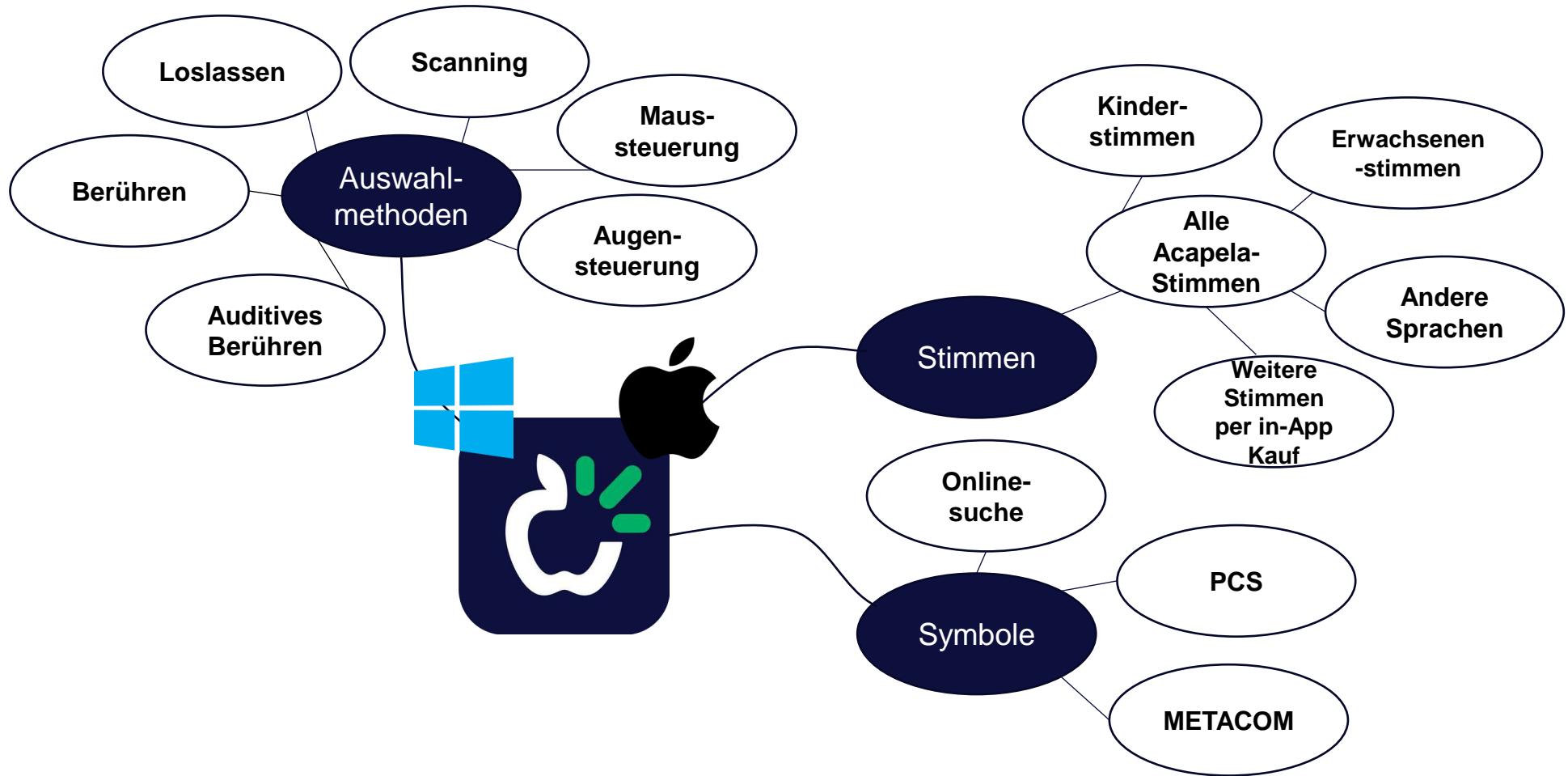

Neue PCS Symbole in TD Snap

Zum Beispiel:


5845 neue Kontrastreiche PCS Symbole hinzugefügt



Symbole in TD Snap

Verbesserte Symbolsuche

The image displays two screenshots of the TD Snap application's search interface. The top screenshot shows a search for the text "ich möchte...". The search bar contains the text, and below it, there are two tabs: "Symbol" (selected) and "Web". The results are displayed as a grid of 8 hand gesture symbols. The bottom screenshot shows a search for the name "Florian Wirtz". The search bar contains the name, and below it, there are two tabs: "Symbol" and "Web" (selected). The results are displayed as a grid of 100 photos of the footballer Florian Wirtz. The interface includes a search bar, filter tabs, and buttons for "Fertig" and "Abbrechen".

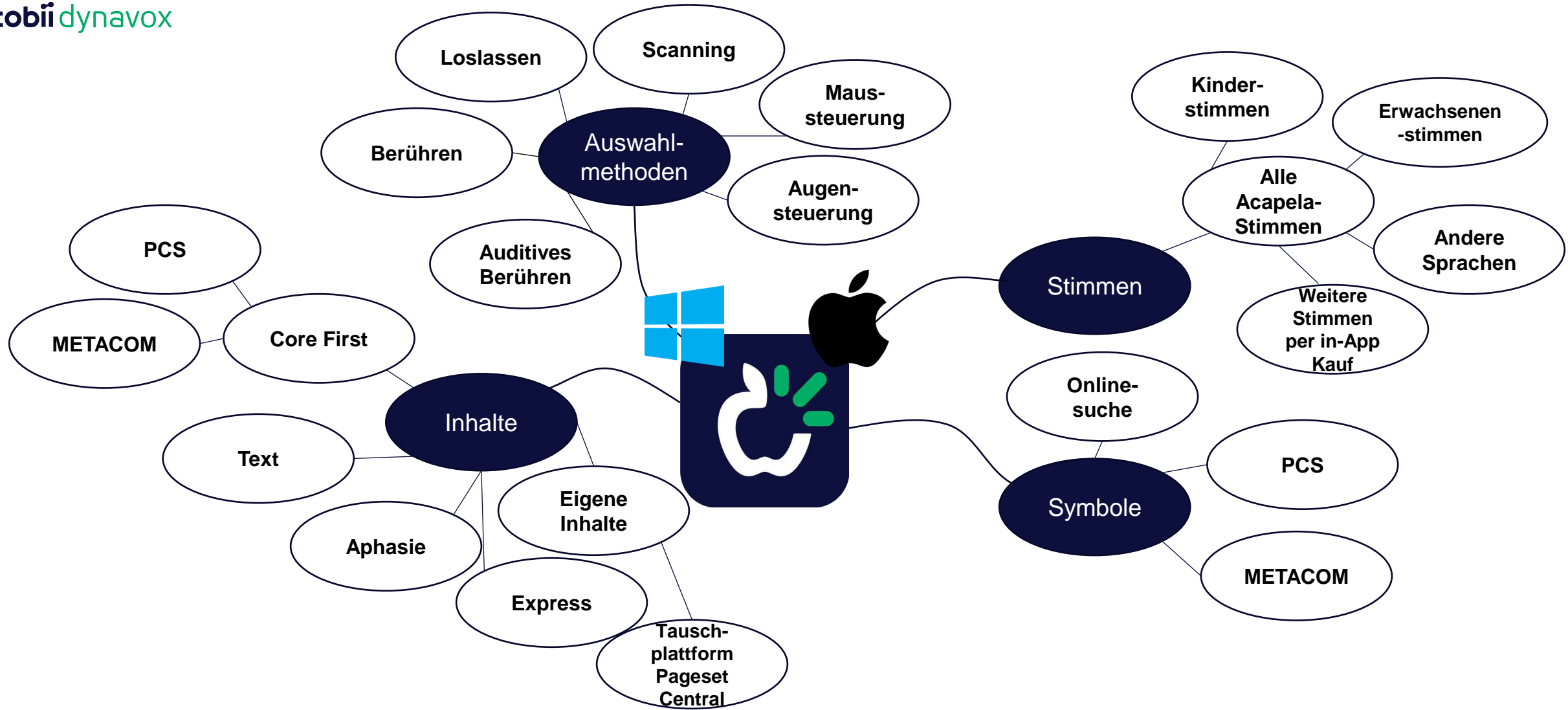

Express



TD Snap – Übersicht der symbolbasierten Inhalte



Eigene, individuelle Inhalte



Vorgefertigte Inhalte
Kern- und Randvokabular,
Kommentaren, Themenseiten und
Tastaturen


Was ist TD Snap Express

- TD Snap Express ist ein **symbolbasiertes** Seitenset, das Menschen dabei helfen soll, ihre Wünsche und Bedürfnisse mithilfe **themenbasierter** Phrasen und Wörter und **minimaler Navigation** auszudrücken.



Was ist TD Snap Express

- Es enthält Worte für **Kinder** und **Erwachsene**, die nach allgemeinen **Aktivitäten und Bedürfnissen** wie Essen und Gefühlen organisiert sind.

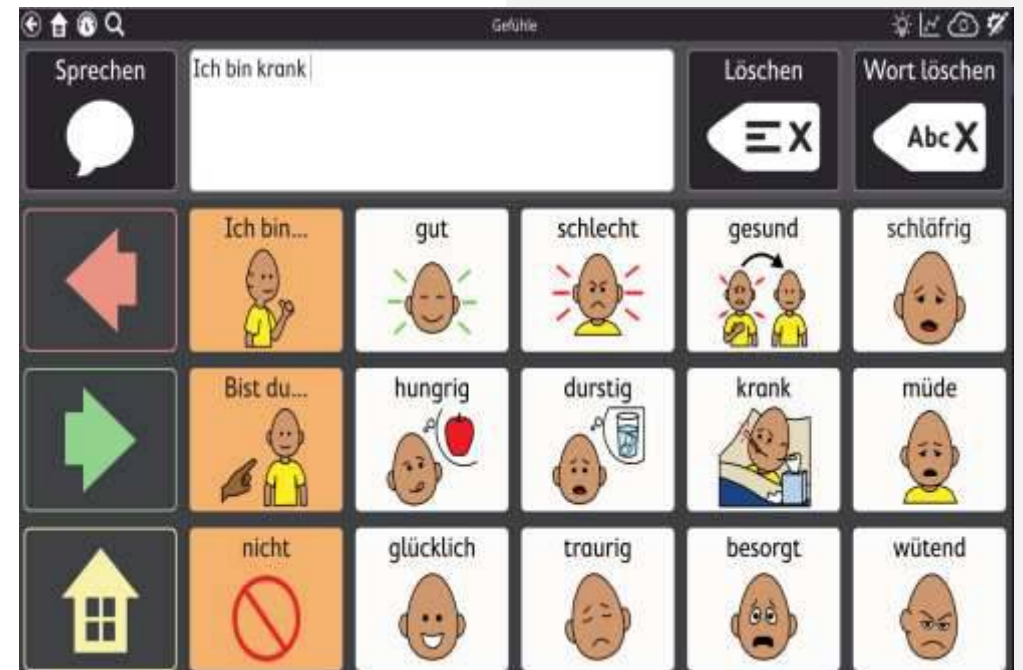

Was ist TD Snap Express

- Es verwendet **große Felder** für die einfache Nutzung per **Touch**, **Scanning**, **(Kopf)Maus** oder **Augensteuerung**.



Die Hauptseite in TD Snap Express

Die Hauptseite in TD Snap Express


Die Mitteilungsleiste:

Hier kann man Aussagen erstellen, (teilweise) löschen sowie sprechen



Die Werkzeugleiste:

Hier kann man zu den Kommentaren, einer Tastatur und der Übersicht wechseln

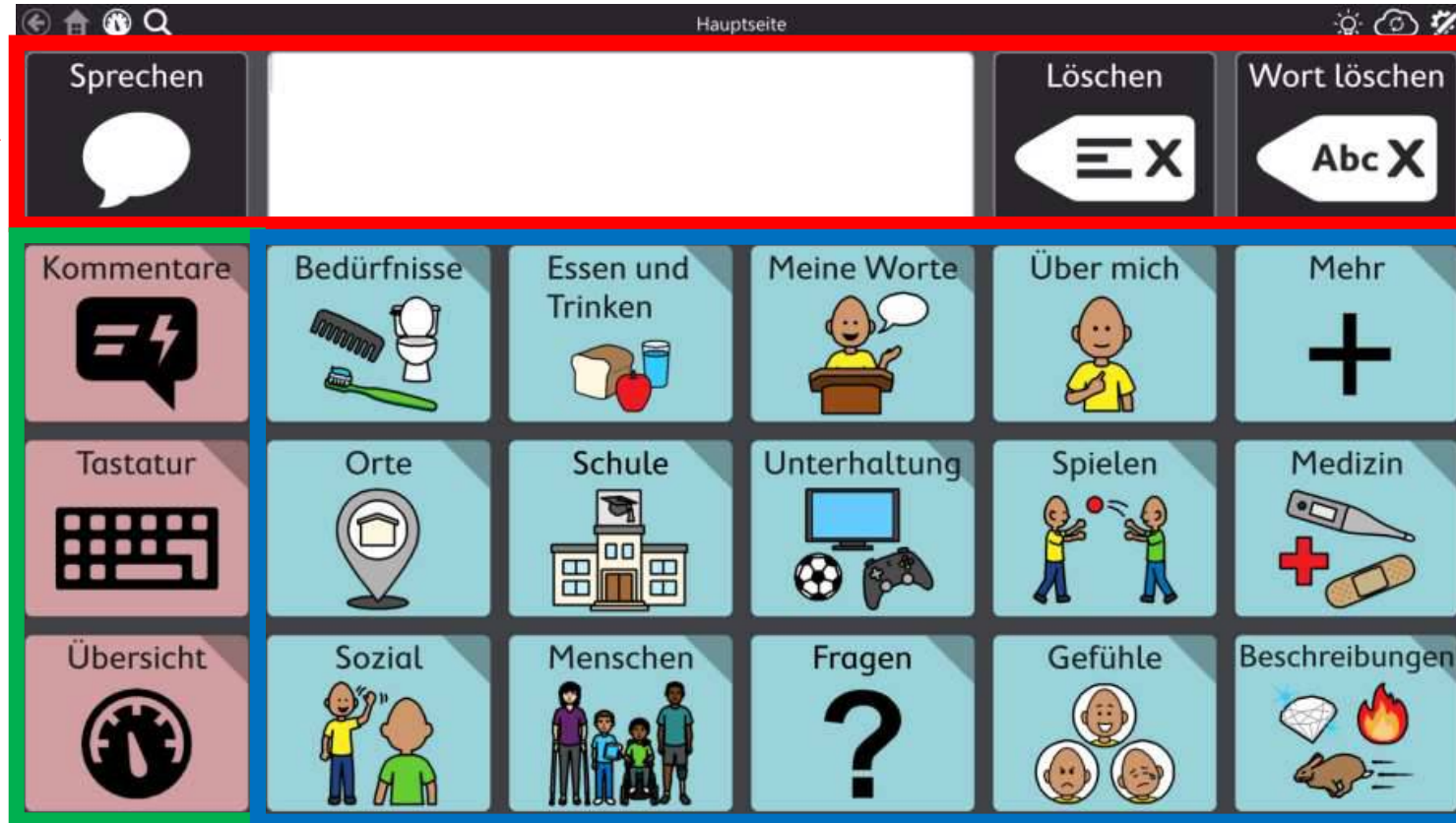

Der Inhaltsbereich:

Hier hat man Zugriff auf Aussagen für alltägliche Situationen



Die Situationsseiten in TD Snap Express

Die Situationsseiten in TD Snap Express


Die Mitteilungsleiste:

Hier kann man Aussagen erstellen, (teilweise) löschen sowie sprechen



Die Navigationsleiste:

Hier kann man mit den Pfeilen auf die nächste/vorherige Seite oder über das Haus zur Hauptseite gelangen

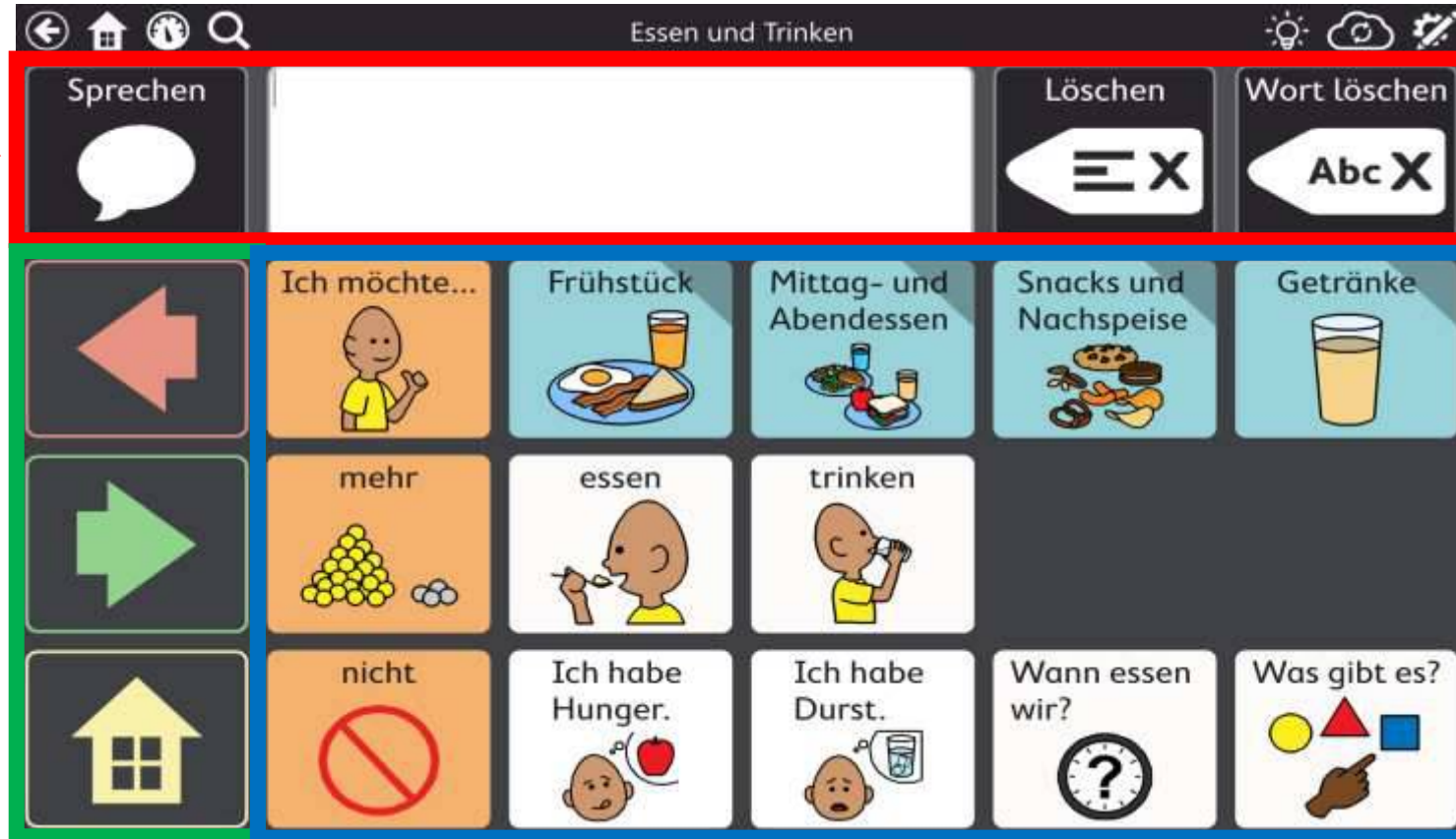

Der Inhaltsbereich:

Hier findet man Inhalte zur ausgewählten Situation. Dieses können:

- Anfänge von Aussagen
- Phrasen
- Einzelworte
- Ordner zu Unterkategorien sein.



Die Kommentarseite in TD Snap Express

Die Kommentarseite in TD Snap Express


Die Mitteilungsleiste:

Hier kann man Aussagen erstellen, (teilweise) löschen sowie sprechen



Die Navigationsleiste:

Hier kann man mit den Pfeilen auf die nächste/vorherige Seite oder über das Haus zur Hauptseite gelangen

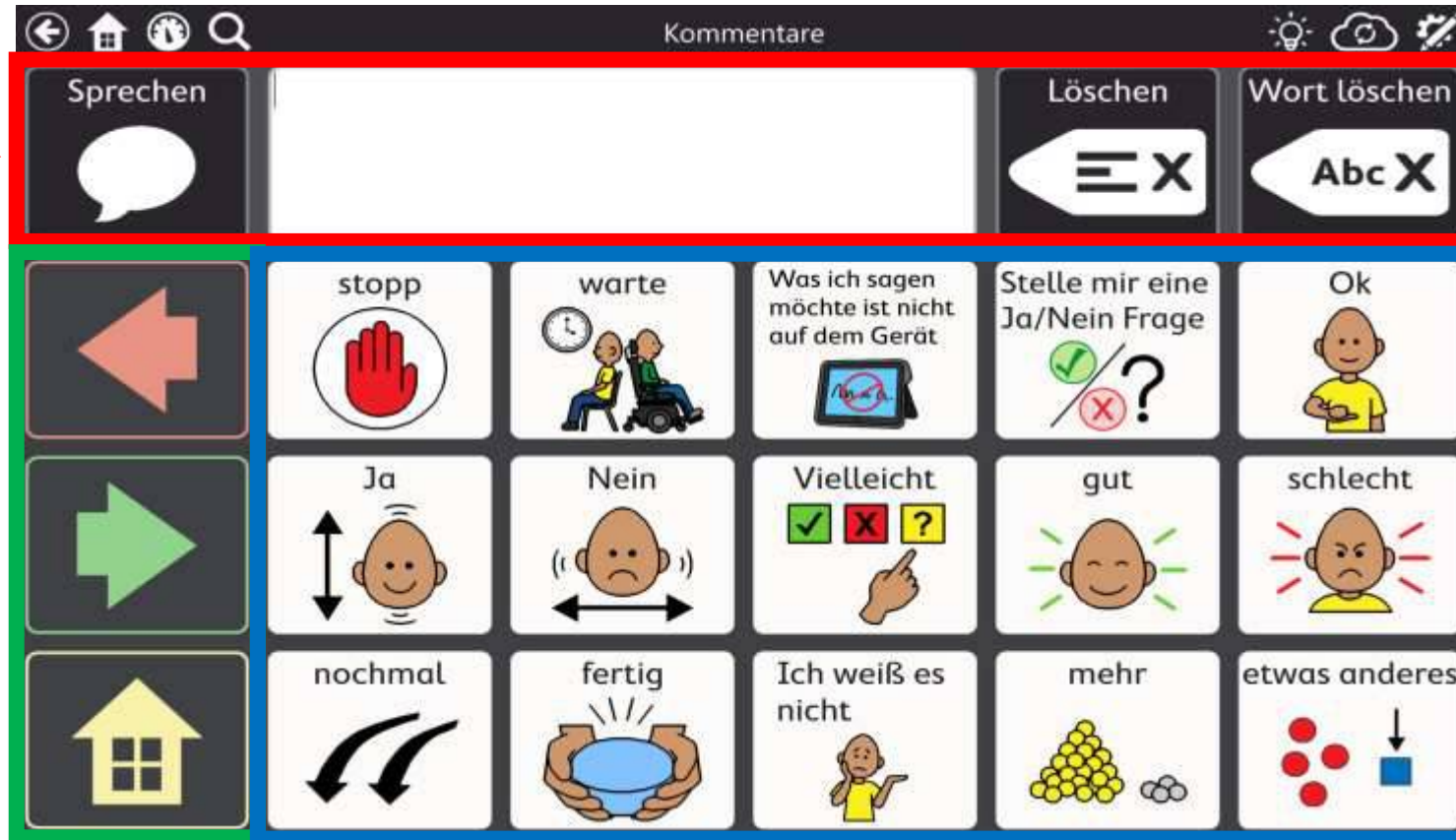

Der Inhaltsbereich:

Hier findet man situationsunabhängige Phrasen oder Einwortsätze.



Hinweis: Zur Unterstützung der schnellen Kommunikation wird bei Auswahl der Inhalt direkt gesprochen.

Die Tastaturseite in TD Snap Express

Die Tastaturseite in TD Snap Express

Die Mitteilungsleiste:

Hier kann man Aussagen erstellen, (teilweise) löschen sowie sprechen



Die Navigationsleiste:

Auf der Tastatur hat man lediglich ein Haus, um zur Hauptseite zu gelangen.



Die Tastaturseite:

bietet die Möglichkeit über Buchstaben eigene Aussagen zu erstellen oder erste Erfahrungen mit diesen zu machen

Über eine mitlernende Wortvorhersage kann die Eingabe beschleunigt werden.

Zugriff auf Zahlen

Und Möglichkeit einzelne Zeichen zu löschen

Die Übersichtsseite in TD Snap Express

Die Übersichtsseite in TD Snap Express


Die Mitteilungsleiste:

Hier kann man Aussagen erstellen, (teilweise) löschen sowie sprechen



Die Navigationsleiste:

In der Übersicht hat man lediglich einen Pfeil, um zur Hauptseite zu gelangen.

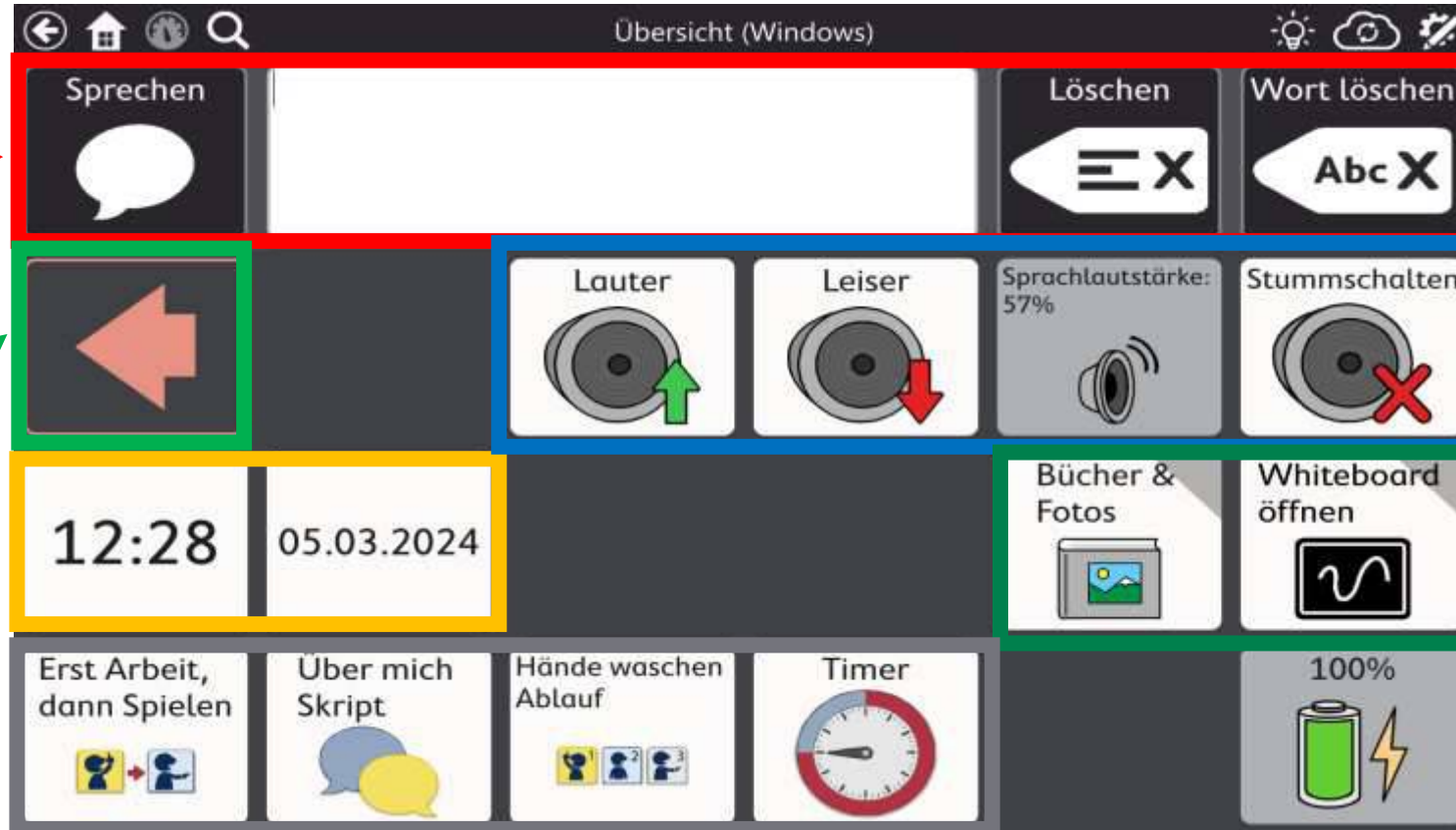

Die Übersicht bietet unterschiedliche Möglichkeiten: Man kann über Felder die Lautstärke anpassen und das Gerät stummschalten

Eine Anzeige von Datum und Uhrzeit mit der Möglichkeit zum aussprechen.


Zugriff auf ein Whiteboard und Foto-/Bücherseiten

Inhalte zur Verhaltensunterstützung

Die Bücher- und Fotoseiten in TD Snap Express

Die Bücher- und Fotoseiten in TD Snap Express


- Auf dieser Seite findet man zwei Beispiele sowie zahlreiche Leervorlagen, die mit eigenen Inhalten gefüllt werden können.
- Bei Auswahl des Texts unter dem Bild, wird dieser gesprochen. Die Sprachausgabe kann durch Auswahl von „Sprechen“ beendet werden. Die Auswahl des Fotos selbst hat keine Auswirkung

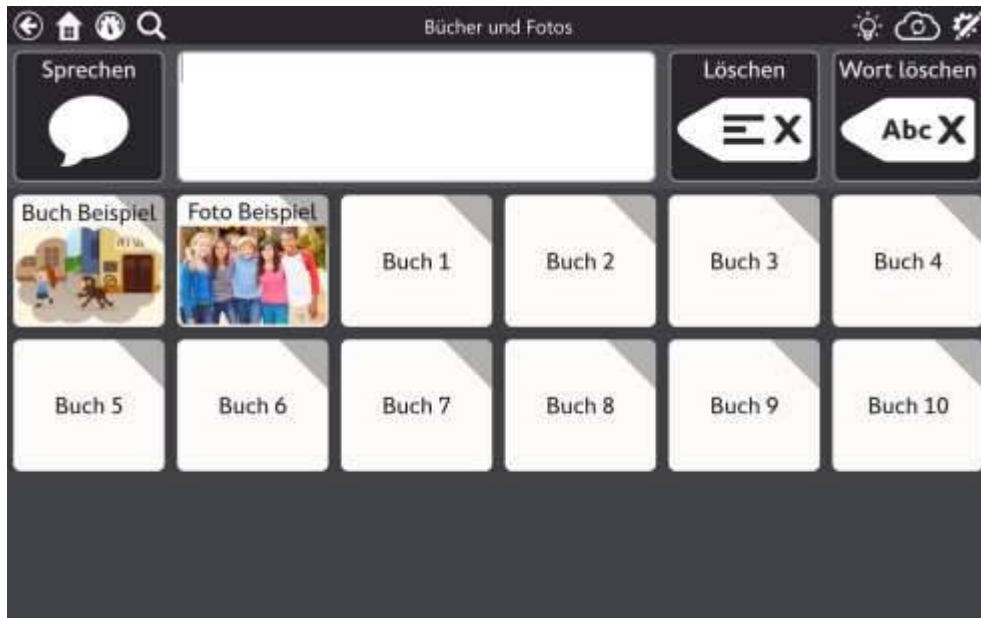

Das Whiteboard in TD Snap Express

Das Whiteboard in TD Snap Express



- Das Whiteboard bietet die Möglichkeit eine Zeichnung innerhalb von TD Snap Express zu erstellen. Zusätzlich können auch Fotos eingefügt werden, die dann ebenfalls noch mit dem Whiteboard bearbeitet werden können.
- **Hinweis: Das Whiteboard funktioniert NUR mit der Auswahlmethode Berühren**

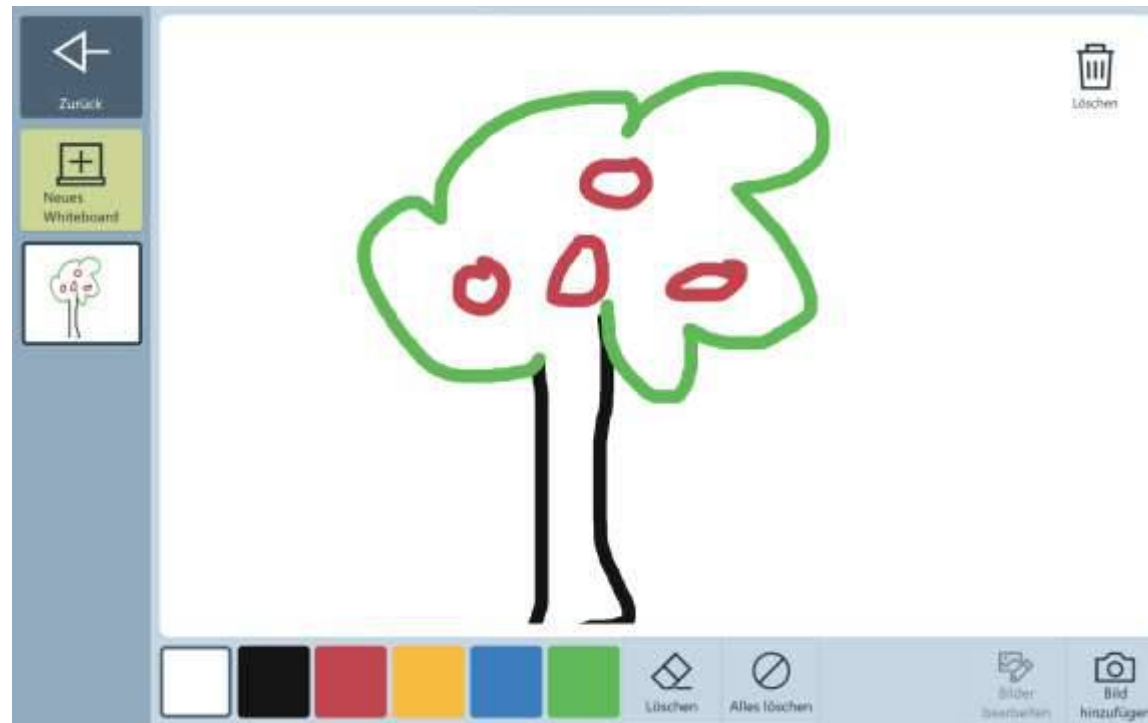

Die Verhaltensunterstützung in TD Snap Express

Die Verhaltensunterstützung in TD Snap Express




- In TD Snap Express gibt es 4 unterschiedliche Arten der Verhaltensunterstützung
- **Timer:** Bei Auswahl färbt sich der obere Balken von TD Snap rot. Die Farbe verschwindet schrittweise, um so den zeitlichen Verlauf darzustellen
- **Zuerst...Dann:** Eine Möglichkeit einfache Regeln zu vermitteln
- **Ablaufplan:** Eine Möglichkeit bis zu vier Schritte einer Handlung zu visualisieren
- **Skript:** Eine Möglichkeit untereinander eine erwartbare Unterhaltung vorzubereiten

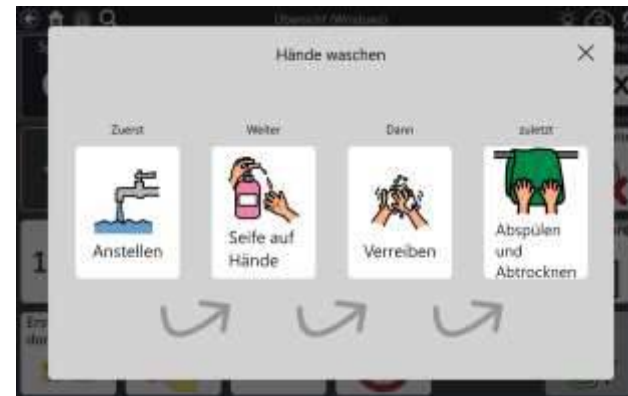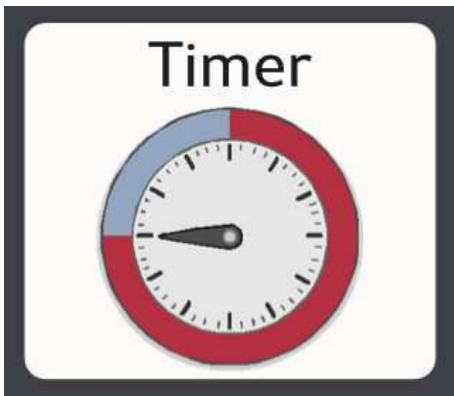

Tastaturseite in TD Snap Express ändern

Tastaturseite in TD Snap Express ändern


- TD Snap Express bietet sowohl eine QWERTZ als auch ABC Tastatur. Diese kann je nach Bedarf angepasst werden.
- Im Bearbeitungsmenü auf den Bereich **Seitenset** gehen.
- Dort den Eintrag **Tastaturseite** auswählen und auf der anschließenden Ansicht eine Suche nach dem Begriff **Tastatur** durchführen. Wählen Sie hier entweder **QWERTZ** oder für ABC die **Tastatur: Simple** aus.
- Die Tastatur wurde nun angepasst. Über **Fertig** das Bearbeitungsmenü verlassen.

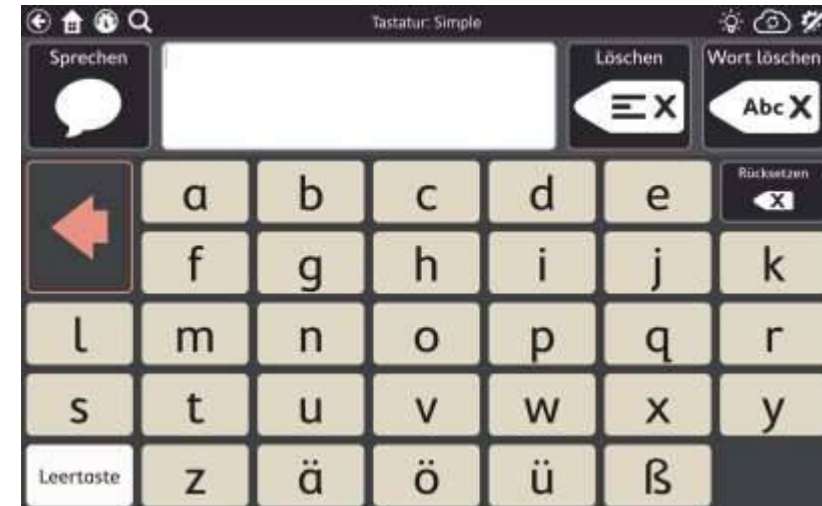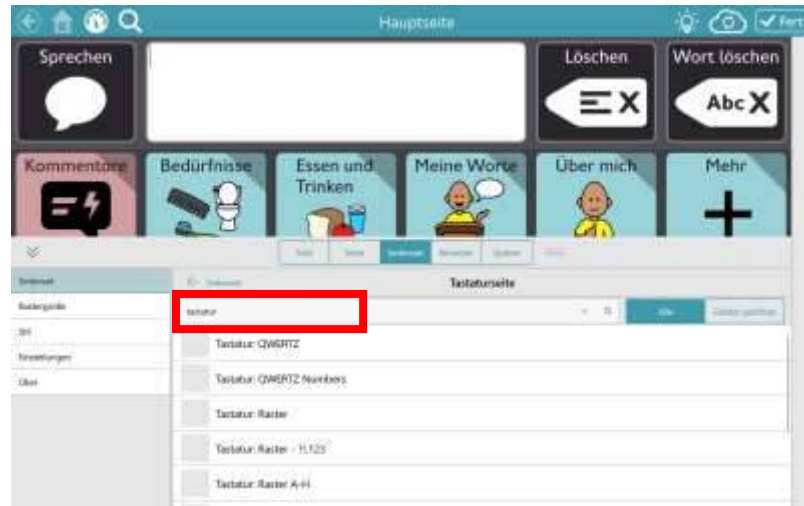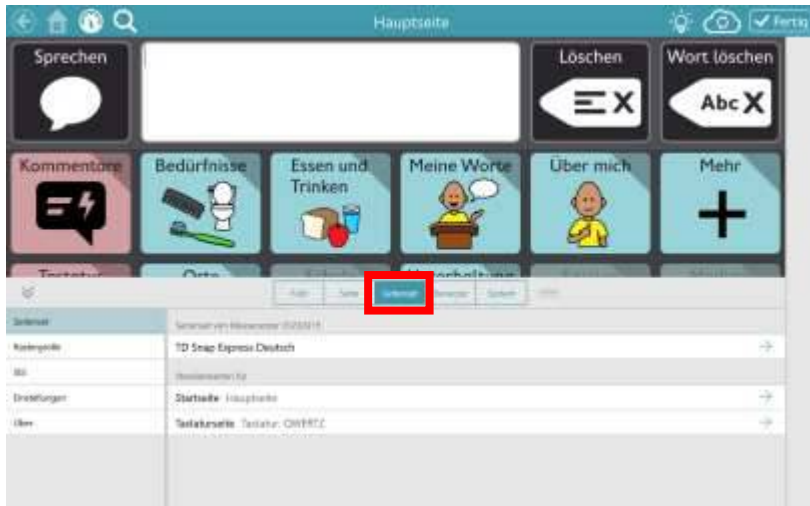


Eigene Situationsseiten in TD Snap Express erstellen

Eigene Situationsseiten in TD Snap Express erstellen

- In TD Snap Express können auch eigene Situationsseiten erstellt werden. Hierfür gibt es bereits Vorlagen, die verwendet werden können:
- Auf Seite gehen, welche die neue Situationsseite öffnen soll. Dort im Bearbeitungsmodus die Ecke des Feldes auswählen und **Verknüpfung auf Kopie von Seite** wählen
- Aus der Liste den Eintrag **_Vorlage wählen** und einen Namen der Seite eintragen. Durch Auswahl von Erstellen wird die Seite erstellt und verknüpft.
- Klicken Sie doppelt auf die neu erstellte Verknüpfung und Sie können nun die neue Seite mit Inhalten füllen

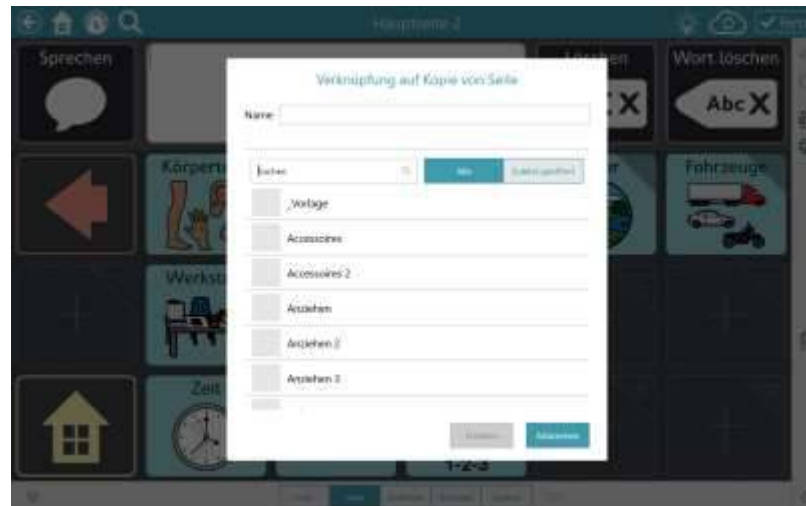

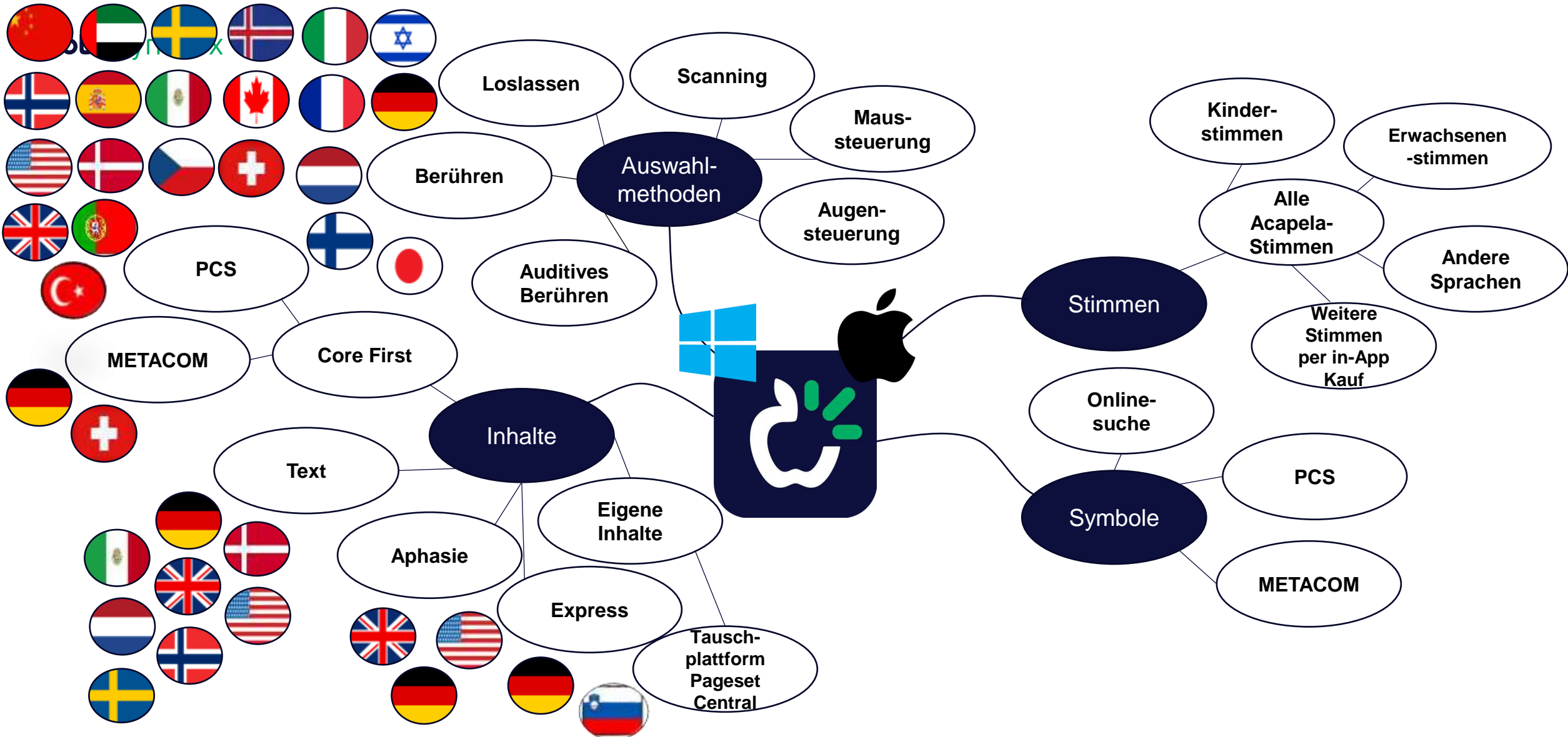



Mehrsprachigkeit

Inhalte von TD Snap sind in zahlreichen Sprachen verfügbar und können miteinander verknüpft werden.

- Arabisch (Core First)
- Chinesisch (Core First)
- Dänisch (Core First, Text)
- Deutsch (Core First, Express, Text, Aphasie)
- Deutsch Schweiz (Core First)
- Englisch (Core First, Motor Plan Text, Aphasie)
- Finnisch (Core First)
- Französisch (Core First)
- Hebräisch (Core First)
- Isländisch (Core First)
- Italienisch (Core First)
- Japanisch (Core First)
- Niederländisch (Core First, Text)
- Norwegisch (Core First, Text)
- Portugiesisch (Core First)
- Schwedisch (Core First, Text)
- Spanisch (Core First, Motor Plan)
- Tschechisch (Core First)
- Türkisch (Core First)

Auf PageSet Central:
Slowenisch (Express)

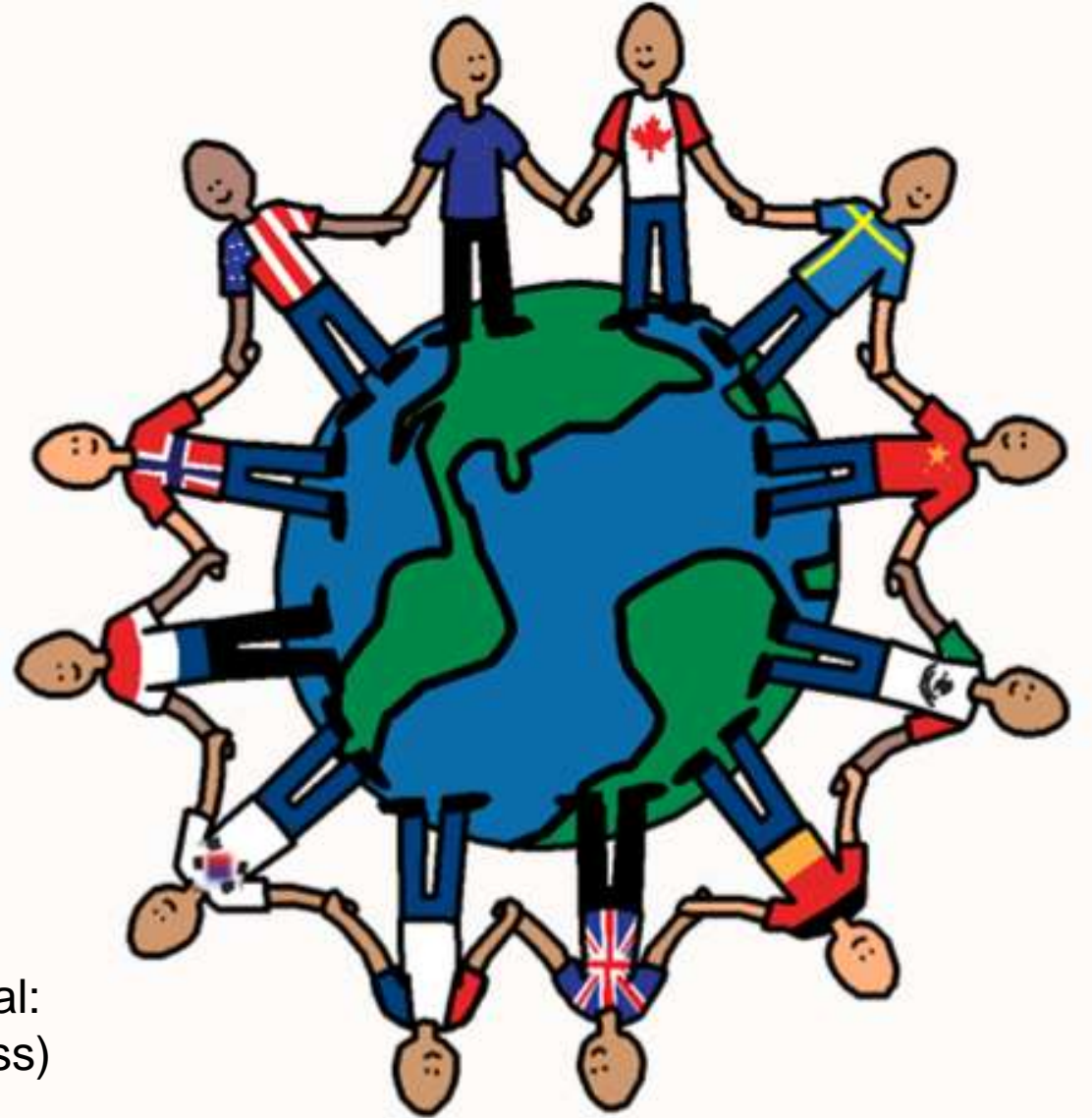

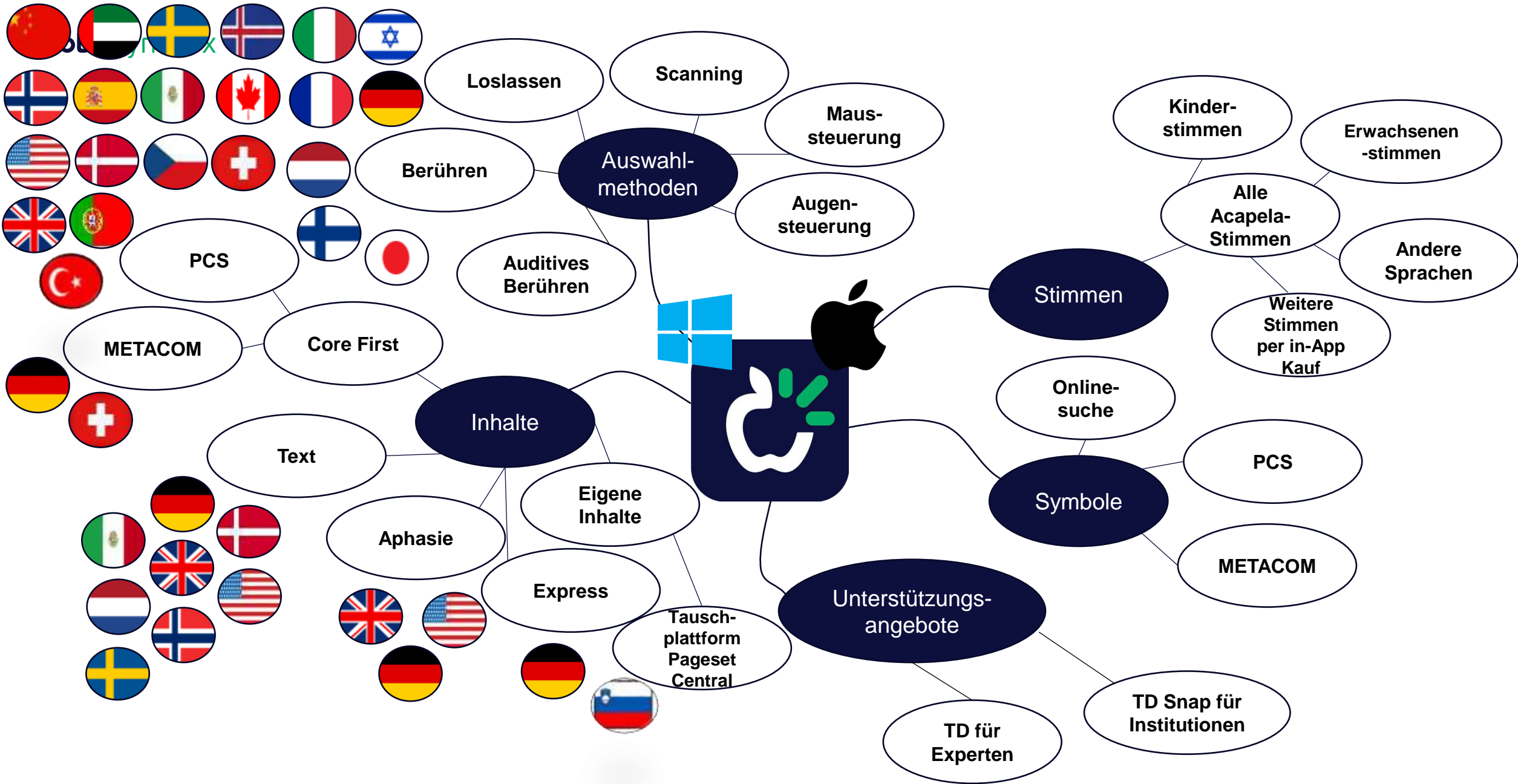

Tobii Dynavox Expertenprogramm

Kostenloser Zugriff auf unsere Kommunikations-Apps

- TD Snap
- Communicator 5

Einfach anmelden und registrieren

<https://de.tobiidynavox.com/pages/tobii-dynavox-for-experts>

tobii dynamox für Experten

Das Dokument beschreibt die Anmeldung für *Tobii Dynavox für Experten* und wie Sie TD Snap & Communicator 5 installieren. Bei Fragen und Rückmeldungen wenden Sie sich an info.dach@tobiidynavox.com oder schauen Sie auf <https://de.tobiidynavox.com/pages/tobii-dynavox-fuer-experten>. Dort finden Sie auch anschauliche Videos zur Durchführung.

ANMELDUNG

1. Gehen Sie auf die Internetseite www.mytobiidynavox.com und wählen Sie in der oberen rechten Ecke **Konto erstellen**.
2. Geben Sie dort Ihre Daten ein und klicken Sie anschließend auf **Konto erstellen**.
3. Sie sind nun auf der Übersichtsseite Ihres myTobiiDynavox Kontos. Wählen Sie nun in der unteren Übersicht „Mehr Produkte“ den Punkt **Experten** aus.
4. Geben Sie auf der neuen Seite die fehlenden Daten ein und wählen Sie unter Berufszugehörigkeit **Anderer**. Machen Sie im Feld Mitgliedsnummer Angaben zu Ihrem Aktivitätsbereich (z.B. Beratungsstelle, Praxis, Schule, Veranstaltung). Dieses Feld darf **nicht** leer bleiben.
5. Klicken Sie abschließend auf **Überprüfen**. Nach einer Bearbeitungszeit von maximal 10 Tagen sollten Sie bei Berechtigung für das Programm freigeschaltet werden. Sie werden dazu über eine E-Mail benachrichtigt.



TD Snap (beinhaltet die Seitensets Text, Core First und Aphasie)

1. Sollten Sie die TD Snap App für ein **Apple iPad** oder **Windows 10 Tablet/PC** benötigen, laden Sie sich die **kostenlose App „TD Snap Lite“** aus dem iPad App Store (für iPad) oder unter <https://www.mytobiidynavox.com/Support/SnapCoreFirst> (für Windows) herunter.
 - **Für Windows:** Klicken Sie nach dem Start auf **„Einlösen“**, im nächsten Schritt auf **„Anmelden und anfordern“** und geben Sie dann ihren **Experten-Zugang** ein.
 - **Für iPad:** Geben Sie beim ersten Starten und Einrichten der Inhalte Ihren **Experten-Zugang** ein.
 - Hinweis: TD Snap beinhaltet die Seitensets „Core First“, „Text“ und „Aphasie“, welche im Zuge der Benutzereinrichtung ausgewählt werden können.



Core First beinhaltet Werkzeuge basierend auf den drei Säulen der UK – Teilhabe, Alphabetisierung und Wachstum. Die Werkzeuge basieren auf Kern- und Randvokabular, ABC-Bereich, Kommentare und Themen.

TD Snap für Einrichtungen

Kostenlose Bereitstellung unserer App

- TD Snap

für Geräte von Einrichtungen (z.B. Kindergärten, Schulen, Werkstätten und Wohnbereich, etc.)

Einfach registrieren und bei uns melden.

Beschreibung hier:

[TD Snap für Einrichtungen](#)

MyTD Konto

Erstellen eines MyTD Konto für die Einrichtung.

Weitergabe der verwendeten Emailadresse und die benötigte Anzahl an Berechtigungen an info.dach@tobii-dynavox.com



Unsere Partner in Österreich

Haben Sie eine Frage zu einem Produkt oder wünschen Sie eine Beratung, so können Sie sich gerne an uns und unsere offiziellen Partner wenden.





Vielen Dank!

Fragen an
info.dach@tobiidynavox.com