



13. & 14. Juli 2026
Johannes Kepler Universität Linz



tobii
dynavox

TD Snap & Schriftsprache

Sven Pfeil
Logopäde

TD Snap

Eine App für iPadOS und Windows

Bietet Kommunikationsinhalte sowohl mit Symbolen als auch textbasiert

Auf TD Geräten bereits enthalten:

TD I-Serie, TD Pilot, TD I-110 und TD Navios

Auch als kostenlose Testversion verfügbar



Tobii Dynavox Expertenprogramm

Kostenloser Zugriff auf unsere Kommunikations-Apps

- TD Snap
- Communicator 5

Einfach anmelden und registrieren

<https://de.tobiidynavox.com/pages/tobii-dynavox-for-experts>

tobii dynavox für Experten

Das Dokument beschreibt die Anmeldung für *Tobii Dynavox für Experten* und wie Sie TD Snap & Communicator 5 installieren. Bei Fragen und Rückmeldungen wenden Sie sich an info.dach@tobiidynavox.com oder schauen Sie auf <https://de.tobiidynavox.com/pages/tobii-dynavox-fuer-experten>. Dort finden Sie auch anschauliche Videos zur Durchführung.

ANMELDUNG

1. Gehen Sie auf die Internetseite www.mytobiidynavox.com und wählen Sie in der oberen rechten Ecke **Konto erstellen**.
2. Geben Sie dort Ihre Daten ein und klicken Sie anschließend auf **Konto erstellen**.
3. Sie sind nun auf der Übersichtsseite Ihres myTobiiDynavox Kontos. Wählen Sie nun in der unteren Übersicht „Mehr Produkte“ den Punkt **Experten** aus.
4. Geben Sie auf der neuen Seite die fehlenden Daten ein und wählen Sie unter Berufszugehörigkeit **Andere**. Machen Sie im Feld Mitgliedsnummer Angaben zu Ihrem Aktivitätsbereich (z.B. Beratungsstelle, Praxis, Schule, Veranstaltung). Dieses Feld darf **nicht** leer bleiben.
5. Klicken Sie abschließend auf **Überprüfen**. Nach einer Bearbeitungszeit von maximal 10 Tagen sollten Sie bei Berechtigung für das Programm freigeschaltet werden. Sie werden dazu über eine E-Mail benachrichtigt.



TD Snap (beinhaltet die Seitensets Text, Core First und Aphasie)

1. Sollten Sie die TD Snap App für ein **Apple iPad** oder **Windows 10 Tablet/PC** benötigen, laden Sie sich die **kostenlose App „TD Snap Lite“** aus dem iPad App Store (für iPad) oder unter <https://www.mytobiidynavox.com/Support/SnapCoreFirst> (für Windows) herunter.
 - Für Windows: Klicken Sie nach dem Start auf **„Einlösen“**, im nächsten Schritt auf **„Anmelden und anfordern“** und geben Sie dann ihren **Experten-Zugang** ein.
 - Für iPad: Geben Sie beim ersten Starten und Einrichten der Inhalte Ihren **Experten-Zugang** ein.
- Hinweis: TD Snap beinhaltet die Seitensets „Core First“, „Text“ und „Aphasie“, welche im Zuge der Benutzereinstellung ausgewählt werden können.



Core First beinhaltet Werkzeuge basierend auf den drei Säulen der UK – Teilhabe, Alphabetisierung und Wachstum. Die Werkzeuge basieren auf Kern- und Randvokabular, ABC-Bereich, Kommentare und Themen.

TD Snap für Einrichtungen

Kostenloser Zugriff auf unsere Kommunikations-Apps

- TD Snap

Einfach Konto anmelden und an info.dach@tobiidynavox.com wenden

MyTD Konto

Erstellen eines MyTD Konto für die Einrichtung.

Weitergabe der verwendeten Emailadresse und die benötigte Anzahl an Berechtigungen an info.dach@tobiidynavox.com



Hardware Optionen



TD I-110



TD I-13 und I-16



TD Navio Mini, Midi & Maxi




TD Pilot

tobiidynavox



Was ist TD
Snap??

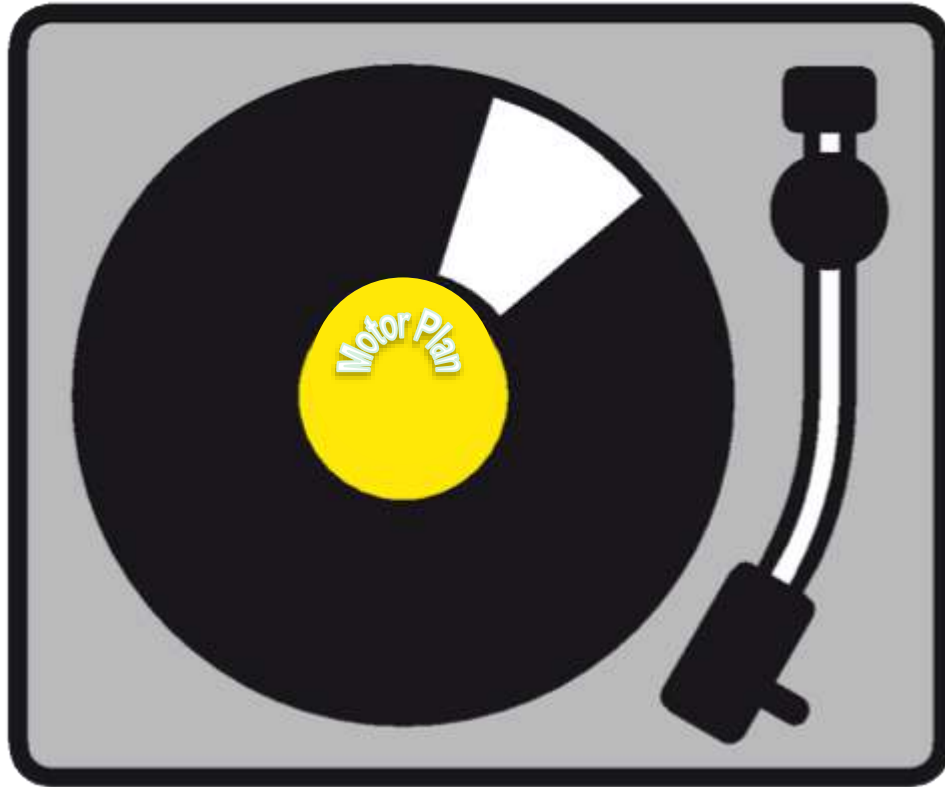


TD Snap



Vokabulare/
Seitensets



Welche Vorteile
bietet die Nutzung
derselben
Plattform??

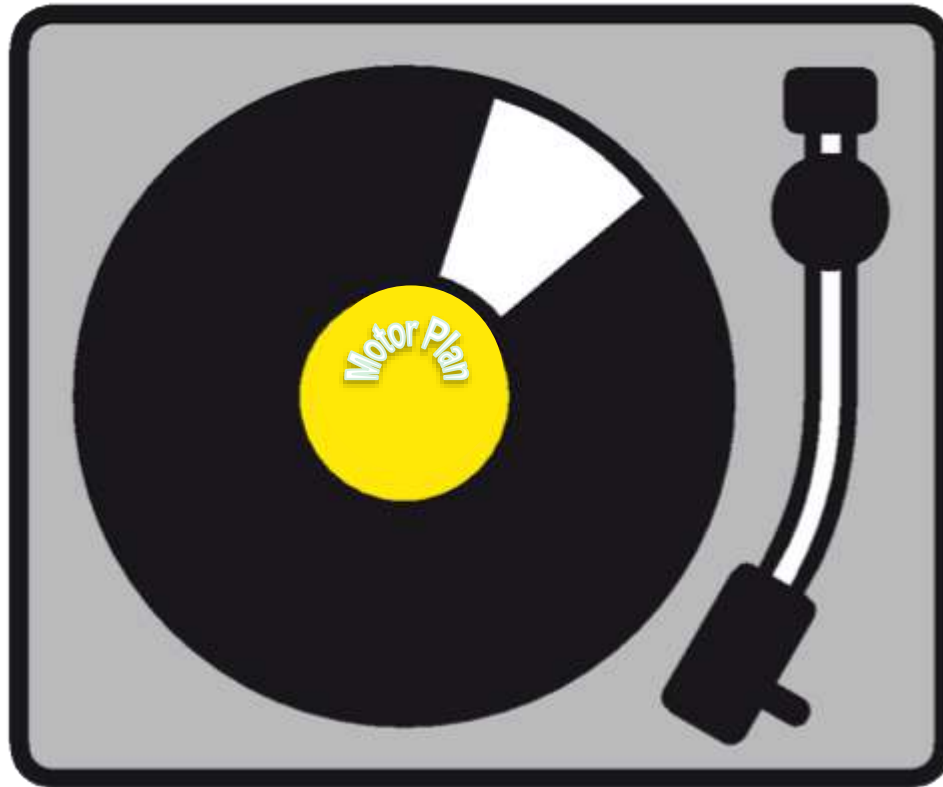

Für Eltern/Lehrer/Therapeuten/Betreuer:

- Lernen, Lehren und Unterstützen mit einer Software.
- Machen Sie sich mit einer Software und ihren Funktionen vertraut, was wiederum eine umfassendere Nutzung ermöglicht.
- Vertrautheit mit den Bearbeitungswerkzeugen, was die Personalisierung fördert.
- Die Möglichkeit, das richtige Gerät bereitzustellen, um die individuellen Bedürfnisse zu erfüllen, bei einer Vielzahl an verschiedenen Geräten.
- Teilen Sie Funktionen über verschiedene Vokabulare hinweg
 - Whiteboard
 - Fotoalben etc
- Einfacher Austausch von benutzerdefinierten Inhalten zwischen Nutzern, z. B.:
 - Vokabular des Lehrplans
 - Events, wie z.B. Olympia
 - Feiertage etc.
 - Wortschatzfilter....



TD Snap Seitensets – Deutsch



Core First



Aphasie



Text



Motor Plan



Express



Eigene Seitensets



Verfügbarkeit von Sprachen



Core First

Arabisch
Chinesisch
Tschechisch
Dänisch

Englisch US
Englisch UK
Englisch CA
Deutsch
Finnisch
Französisch
Französisch CA
Deutsch
Deutsch
(Schweiz)
Hebräisch
Isländisch
Italienisch
Japanisch
Norwegisch
Niederländisch
Portugiesisch
(BR)
Polnisch
Spanisch (MX)
Spanisch
Schwedisch
Türkisch



Aphasie

Deutsch
Englisch US
Englisch UK
Französisch
Italienisch
Spanisch
Spanisch MX

*Niederländisch
(PSC)*



Text

Dänisch
Englisch US
Englisch UK
Deutsch
Französisch
Italienisch
Niederländisch
Norwegisch
Portugiesisch
Schwedisch
Spanisch
Spanisch (MX)

*Katalanisch
(PSC)
Baskisch (PSC)*



Motor Plan

Englisch US
Englisch UK

Englisch AU

Deutsch

Spanisch (MX)
Spanisch



PODD

English US
English UK
English CA
English AU



Gateway

English US
English UK
English CA
English AU



Scanning

English US
English UK
English CA
English AU



Express


Arabisch
Chinesisch Vereinfacht
Dänisch
Deutsch
Englisch AU
Englisch UK
Englisch US
Englisch_Spanisch US
Französisch
Französisch KA
French CA
Italienisch
Japanisch
Niederländisch
Norwegisch
Polnisch
Portugiesisch
Portugiesisch BR
Schwedisch
Slowenisch
Spanisch
Spanisch MX
Ukrainisch

Afrikaans (PSC)
Baskisch (PSC)
Catalanisch (PSC)
Chinesisch Traditionell
(PSC)
Estnisch (PSC)
Flämisch (PSC)
Galicisch (PSC)
Gälisch_Irisch (PSC)
Isländisch (PSC)
Lettisch (PSC)
Litauisch (PSC)
Walisch (PSC)



Hauptmerkmale
deutsche
Seitensets

- Symbolbasiert
- PCS
- Metacom
- Widgit
- Textbasiert
- Visuelle Szenen
- Leere Vorlagen verfügbar
- QWERTZ Tastatur
- ABC Tastatur
- Raster Tastatur
- Whiteboard
- Verhaltensunterstützung
- Bücher und Fotos
- Starten externer Anwendungen
- Google Assistant
- Kernvokabular
- Randvokabular
- Vorgespeicherte Nachrichten
- Zugängliche Geräteeinstellungen
- Zugängliche Auswahleinstellung
- Intelligente Assistenten
- Desktopkontrolle

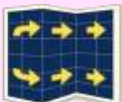	 Core First Seitenset	 Aphasie Seitenset	 Text Seitenset	 Motor Plan Seitenset	 Express Seitenset
Symbolbasiert	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
PCS	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Metacom	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Widgit	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Textbasiert	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Visuelle Szenen	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein
Leere Vorlagen verfügbar	Ja		Ja	Nein	Ja
QWERTZ Tastatur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
ABC Tastatur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Raster Tastatur	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Whiteboard	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Verhaltensunterstützung	Ja		Nein	Ja	Ja
Bücher und Fotos	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Starten externer Anwendungen	Ja		Ja	Ja	Nein
Google Assistant	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Kernvokabular	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Randvokabular	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Vorgespeicherte Nachrichten	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zugängliche Geräteeinstellungen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zugängliche Auswahleinstellung	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Intelligente Assistenten	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Desktopkontrolle	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja



Auswahl- methoden



Core First
Seitenset



Gaze
Interaction



Einfaches
Berühren**



Berühren +
Auditives Berühren



Loslassen



Mit Maus
verweilen



Scanning



Aphasie
Seitenset



Gaze
Interaction



Einfaches
Berühren



Berühren +
Auditives Berühren



Loslassen



Mit Maus
verweilen



Scanning



Text
Seitenset



Gaze
Interaction



Einfaches
Berühren



Berühren +
Auditives Berühren




Loslassen



Mit Maus
verweilen



Scanning

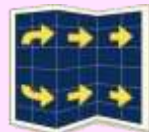

Motor Plan
Seitenset



Gaze
Interaction**



Einfaches
Berühren**



Berühren +
Auditives Berühren



Loslassen



Mit Maus
verweilen



Scanning



Express
Page Set



Gaze
Interaction



Einfaches
Berühren



Berühren +
Auditives Berühren



Loslassen




Mit Maus
verweilen




Scanning

Bearbeitungsebenen


Feld

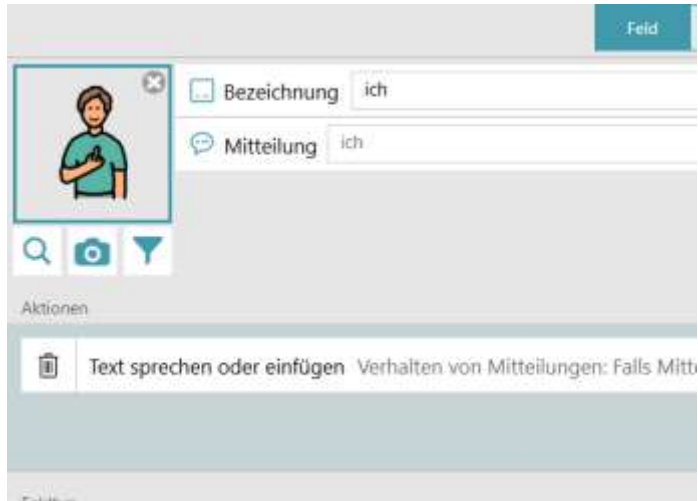

Seite

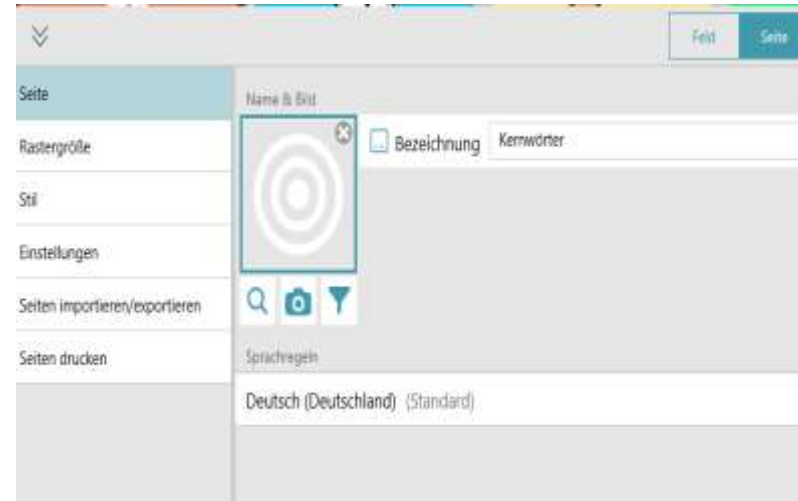


Seitenset

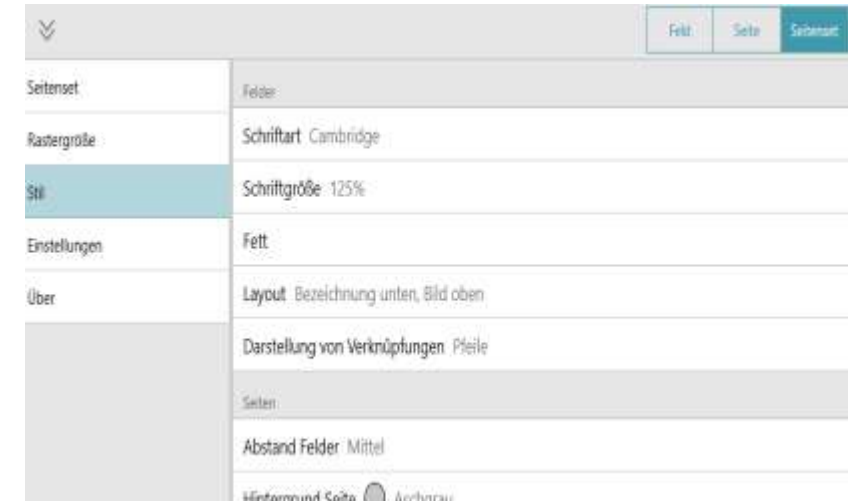

Bearbeitungsebenen

Seite

Feld

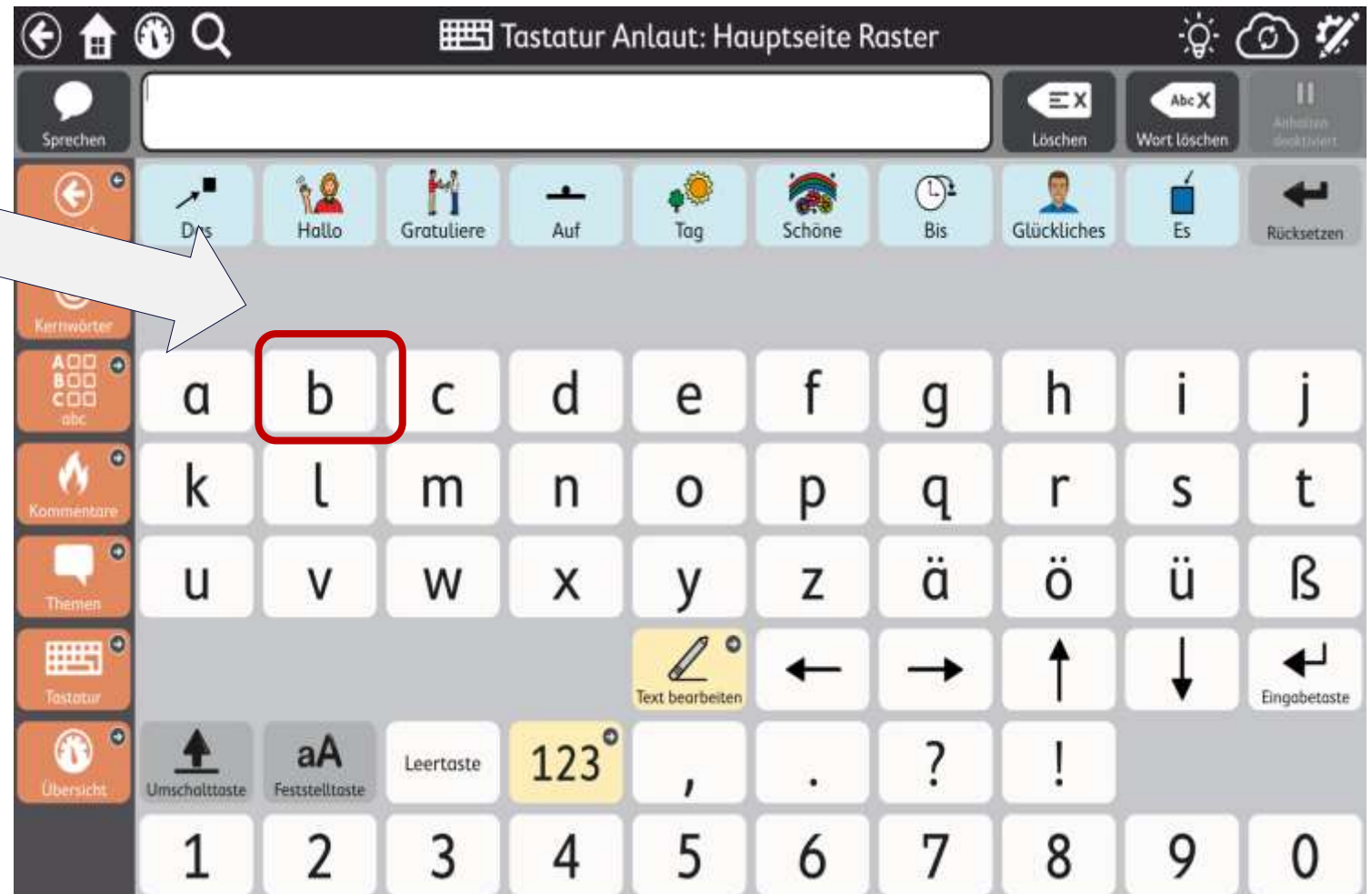


Bearbeitungsebenen

Seite


Feld

Felder
ausblenden

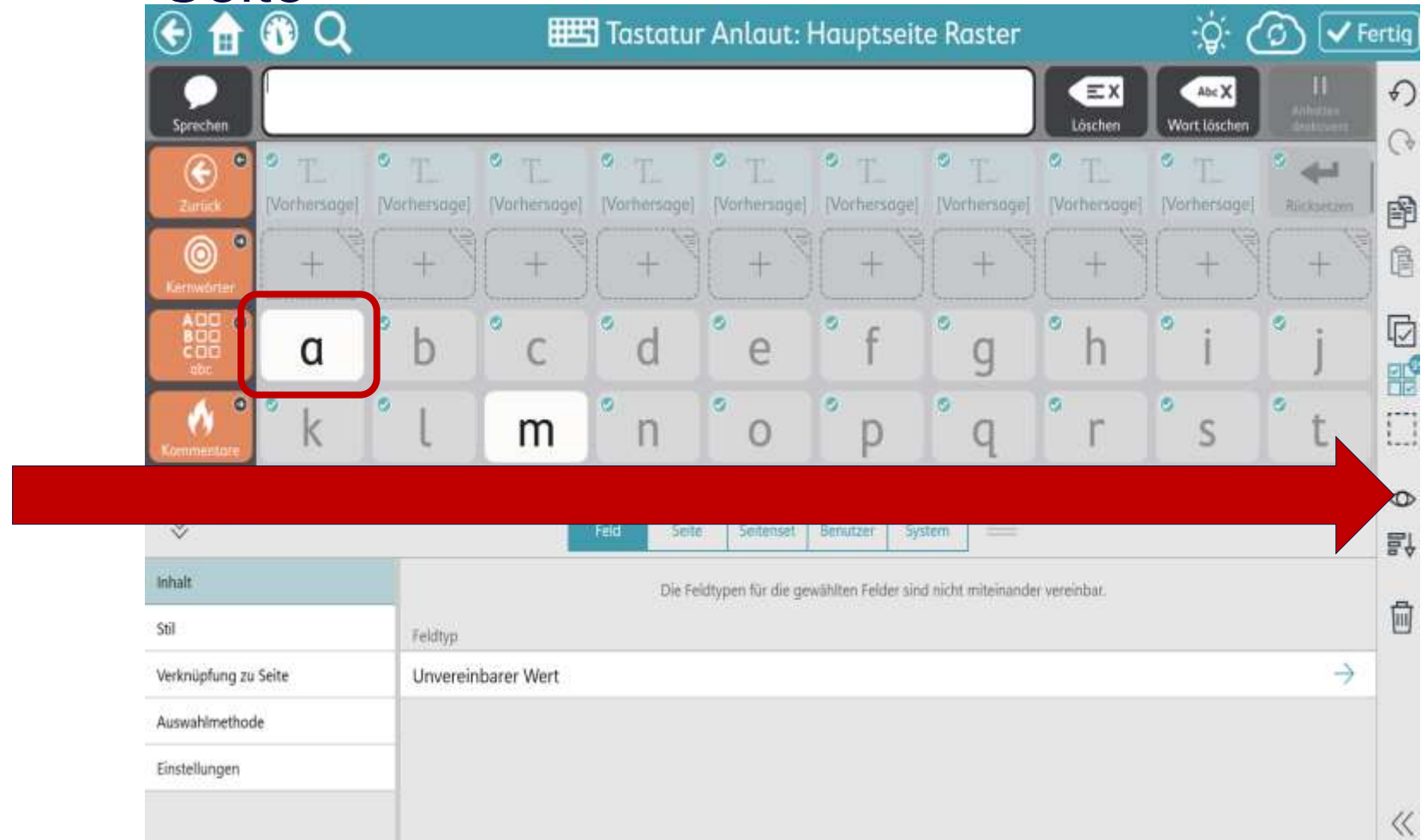

Bearbeitungsebenen

Seite


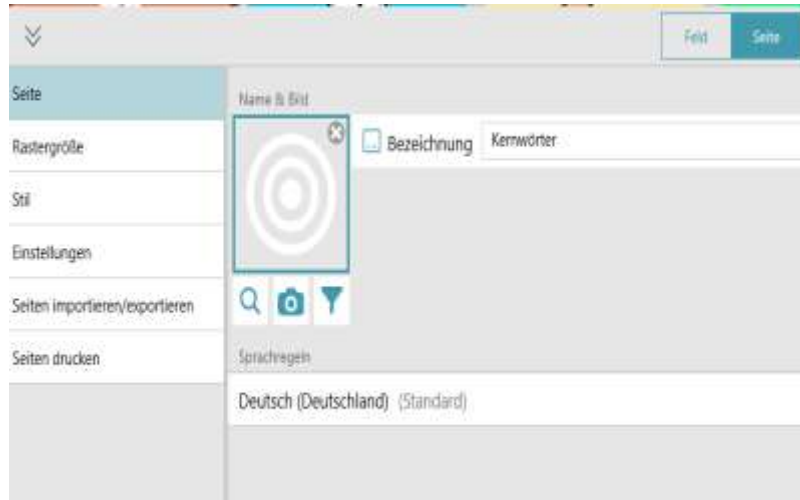


Seite




Bearbeitungsebenen

Seitenset

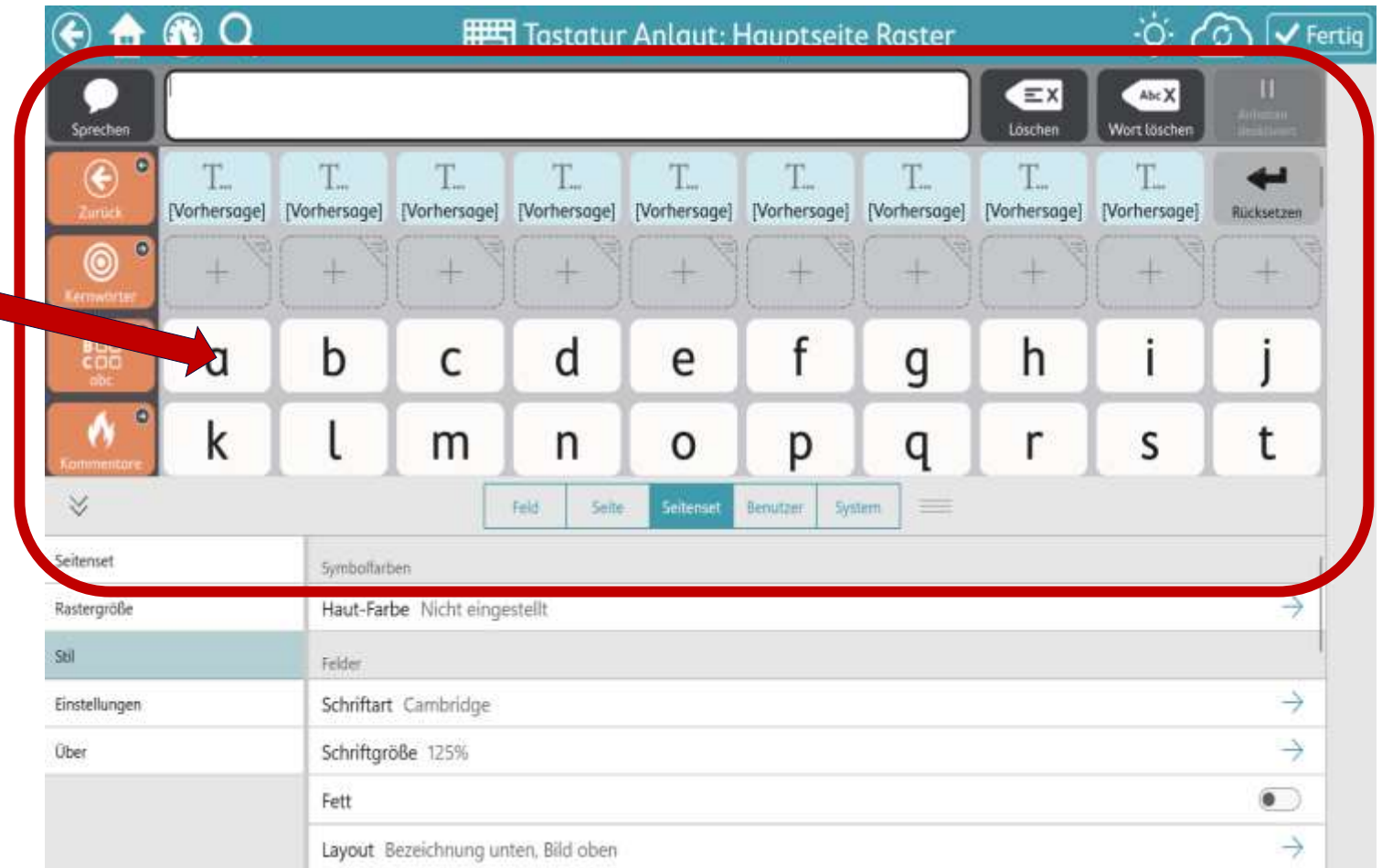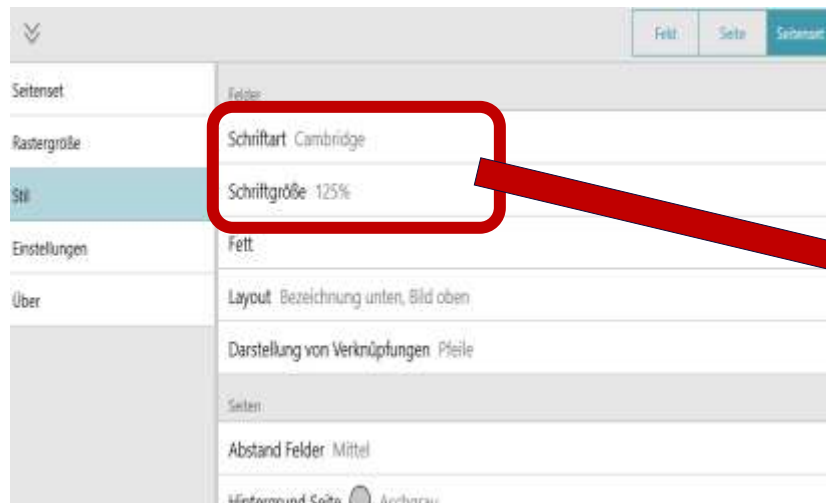


An die Bedürfnisse anpassbar

- Symbol im Mitteilungsfenster an/aus
- Das gesprochene im Mitteilungsfenster visualisieren
- Symbole auf Vorhersagefelder an/aus

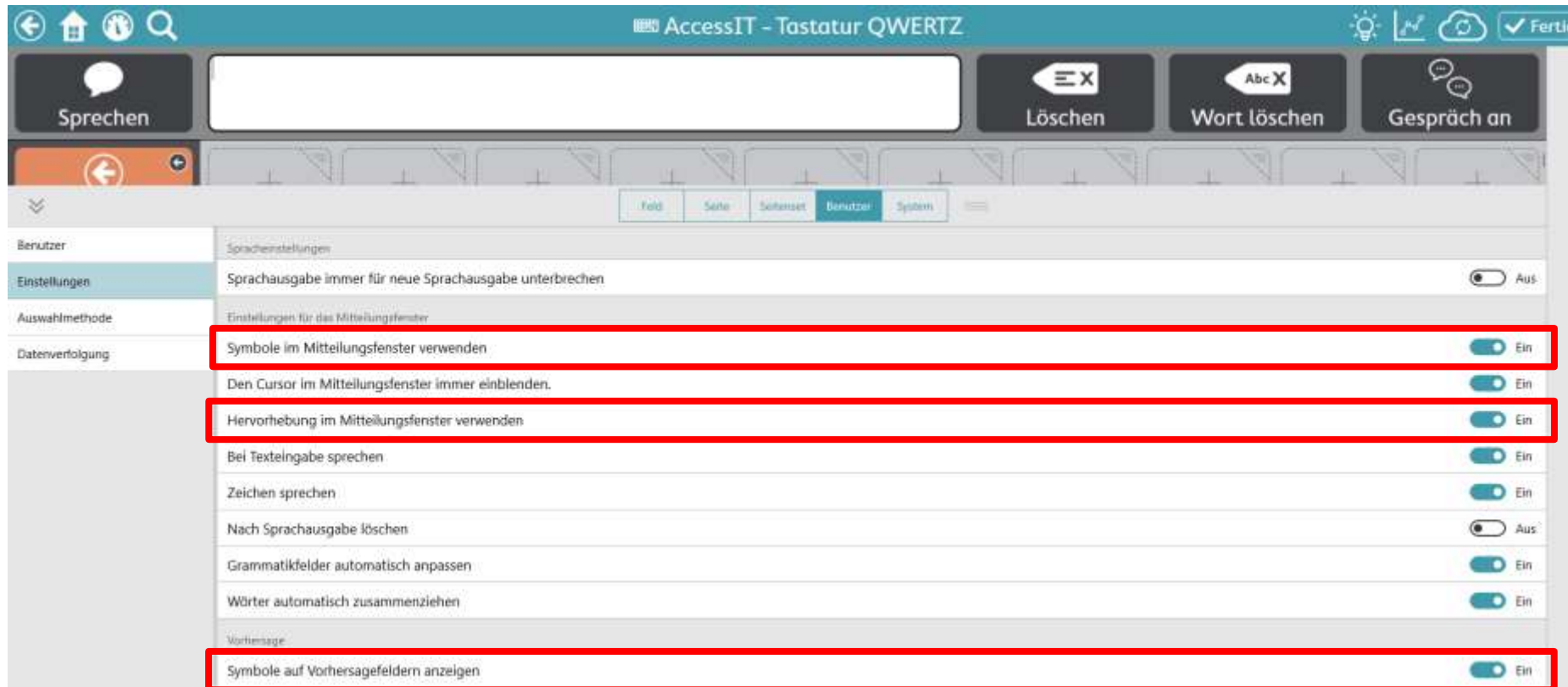

Mitteilungsfenster bearbeiten

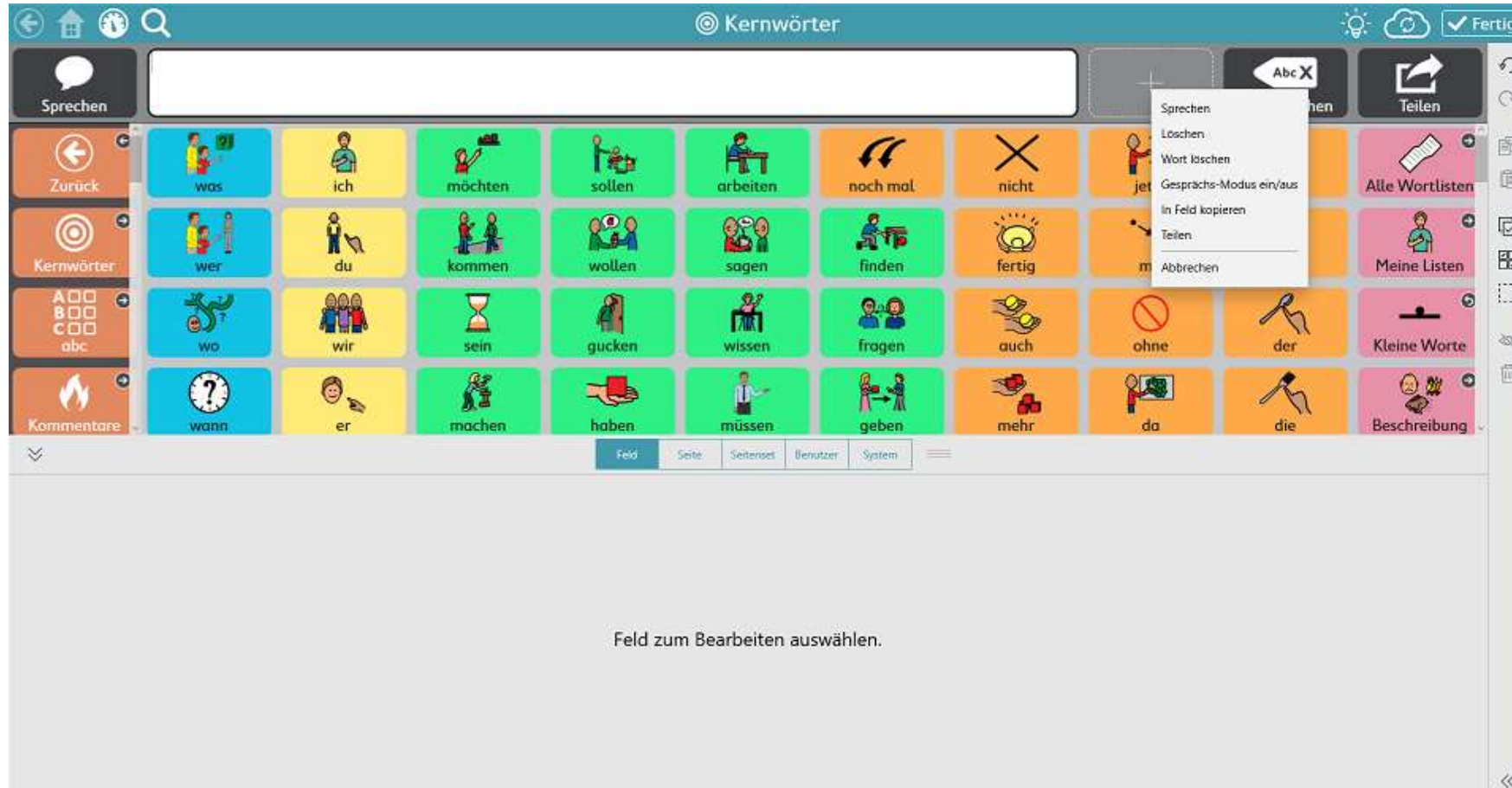

- Anpassungen können hier über **löschen** von Feldern gemacht werden.
- Neue Funktionen auf Felder legen
- Feldgröße verändern
- Felder verschieben
- Farbe und Schrift anpassen


Tastaturen

- Verschiedene Tastaturen vorhanden. Alle anpassbar.



Kombination von Geräten im Klassenraum


- Mit dem AccessIT 3 Inhalte aus TD Snap Core First an anderen Computer oder die interaktive Tafel im Klassenraum senden

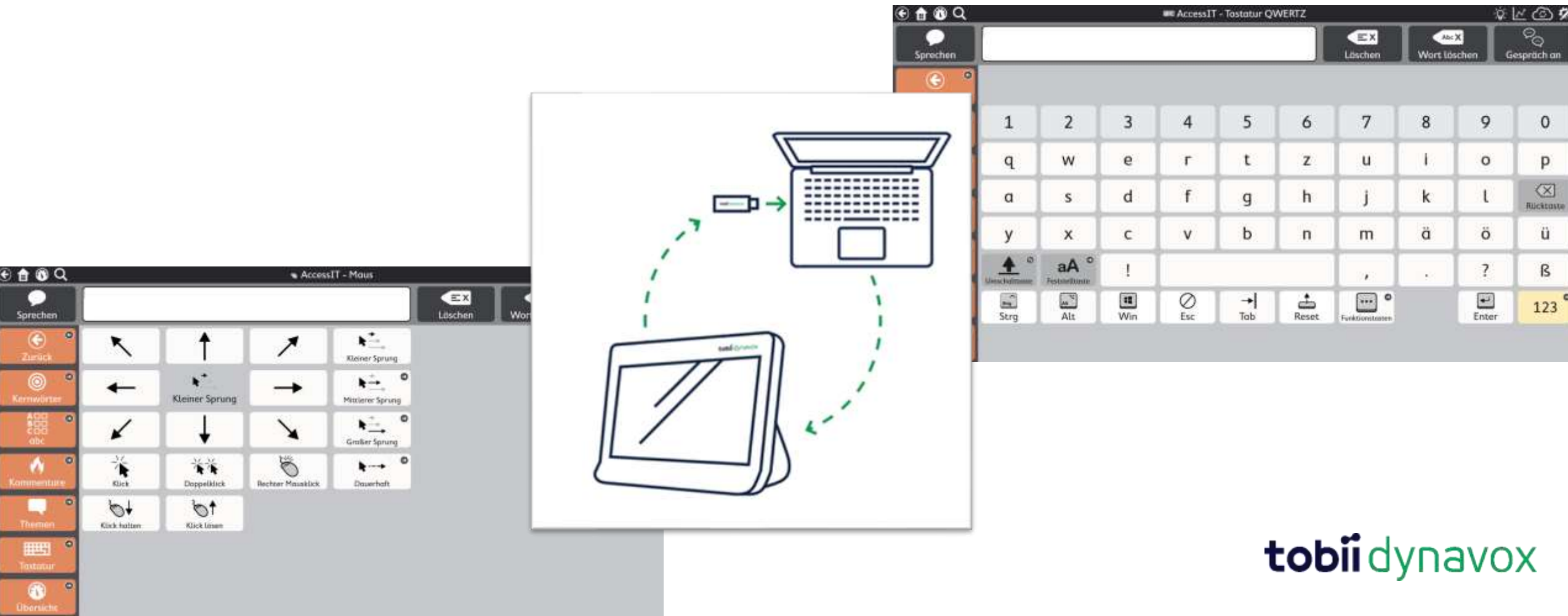

Verhaltensregeln

- Vorlagen auf PSC zum Strukturieren des Schulalltags:
[Vorlage hier herunterladen](#)
- Anpassung möglich:  [Videoanleitung - Verhaltensunterstützung](#)


Wie importieren:  [Videoanleitung - Importieren](#)

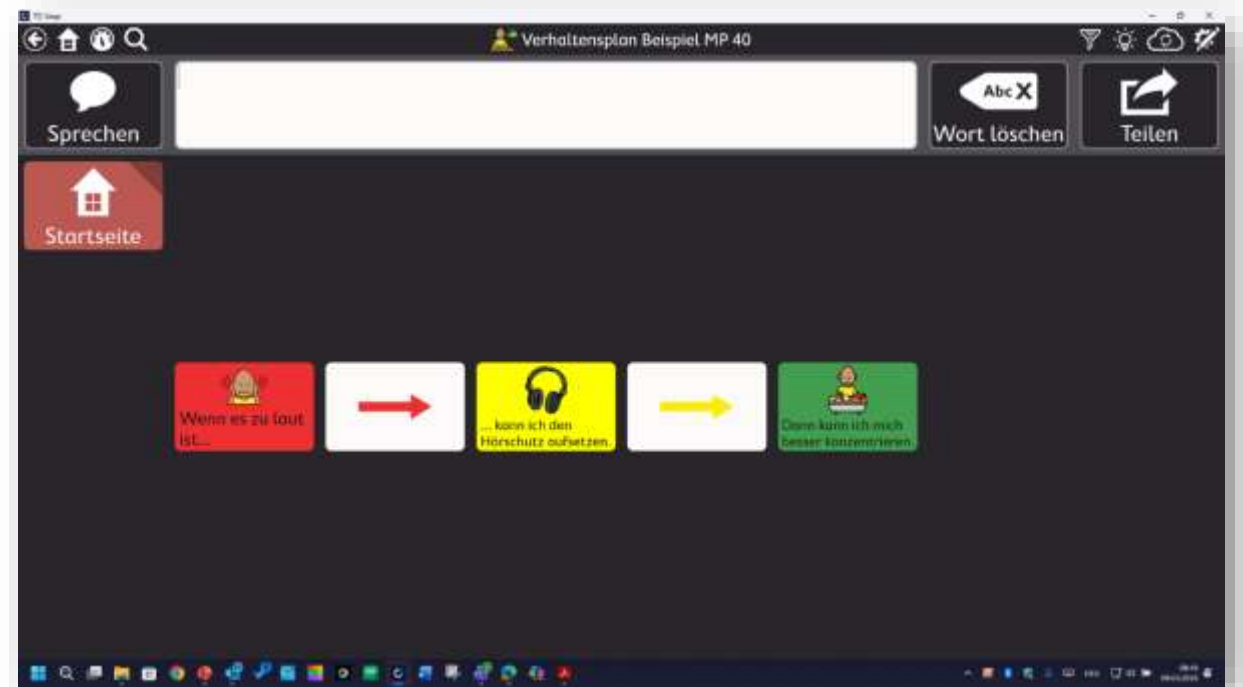

Verhaltensunterstützung nutzen und programmieren

- Im Bearbeitungsmodus unter “Feld > Aktionen > Visuelle Unterstützungen” findet man die gewünschten Aktionen zur Verhaltensunterstützung.

• Erklärvideo:
Verhaltensunterstützung

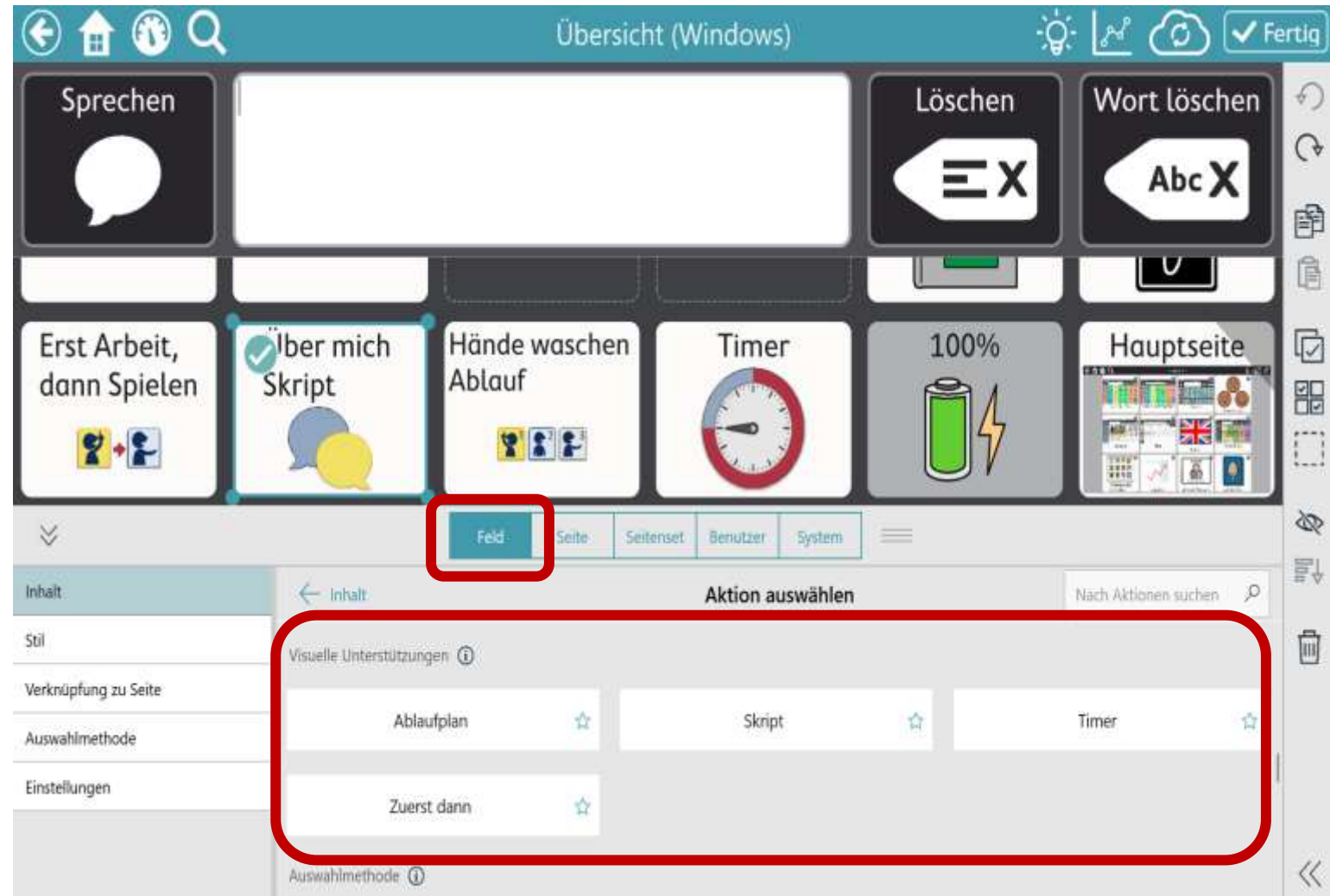


Deutsch

- Vorlagen für Seitensets auf PSC

[1. Beispiel](#)

[2. Beispiel](#)

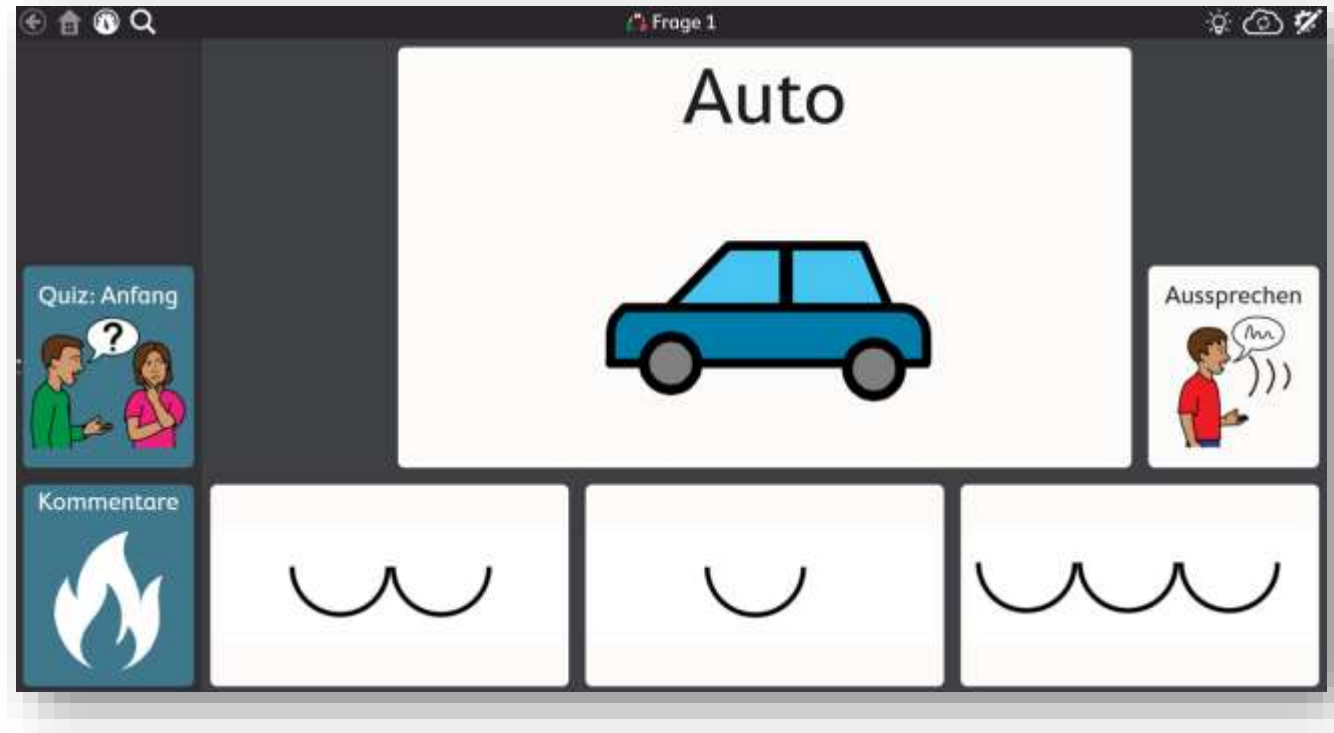

- Eigene Bücher und Quiz erstellen:

[Vorlage hier herunterladen](#)

Wie importieren:  [Videoanleitung - Importieren](#)


Deutsch

- Bereits vorhandene Bücher für TD Snap:
 - Über Fukushima [Hier herunterladen](#)
 - Der freche Hund [Hier herunterladen](#)
 - Corona und ich [Hier herunterladen](#)
- Weitere kostenlose Bücher in Kooperation mit dem Don Bosco Verlag
 - Die Weisen aus dem Morgenland
 - Die Bremer Stadtmusikanten
 - Der dicke fette Pfannkuchen [Hier anschauen](#)



Whiteboard

- Künstlerische Aktivitäten
- Buchstaben, Zahlen nachspuren (Als Bild importierbar)

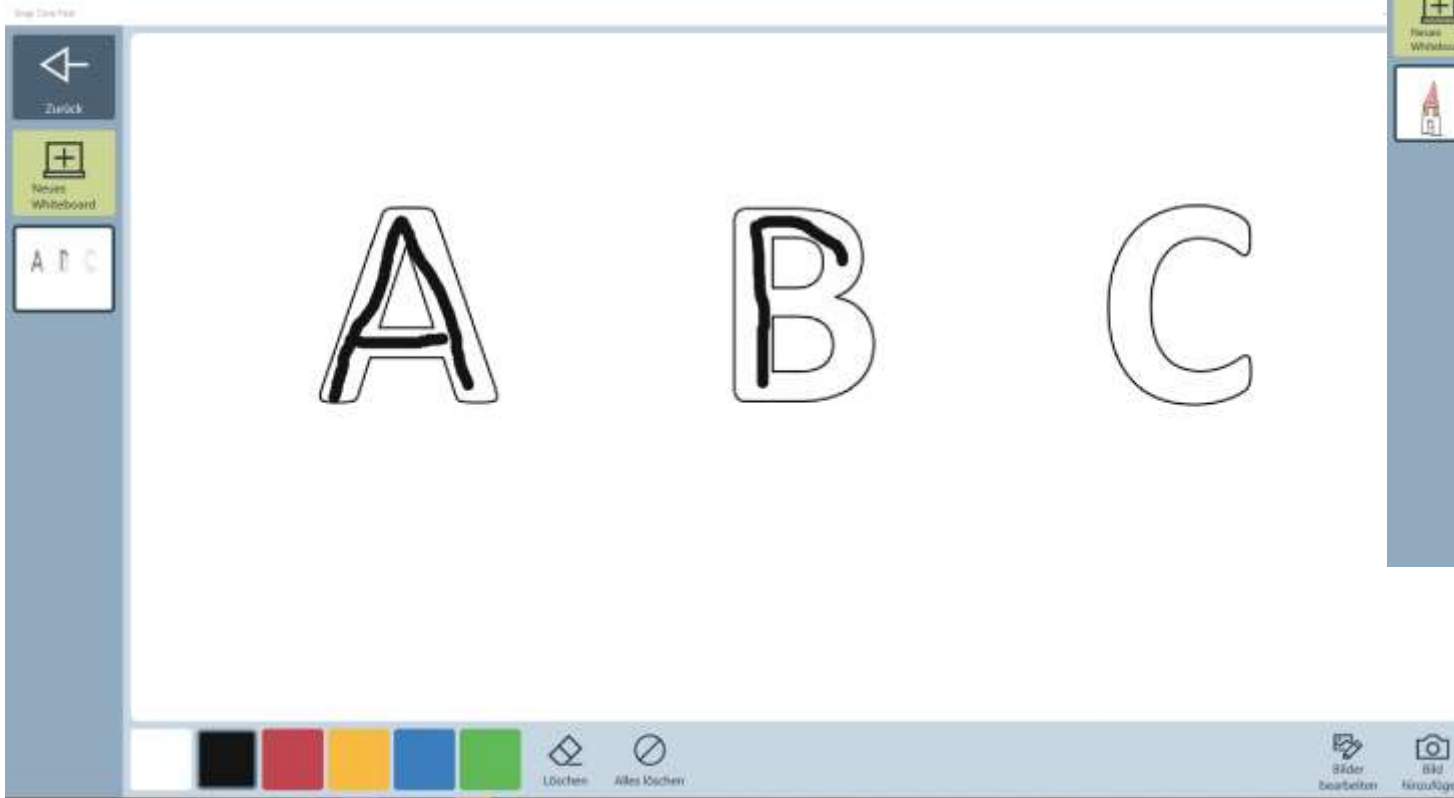

Zweitsprache

- TD Snap enthält Core First, Motor Plan & Express Seitensets und Tastaturen auch in anderen Sprachen, z.B. Englisch, Französisch oder Spanisch. Einfach Mehrsprachigkeit nutzen:



[Videoanleitung - Mehrsprachigkeit](#)



Kernwörter

- Bücher zu den ersten 12 Kernwörtern:

[Bücher hier herunterladen](#)


- Übungspläne für die Bücher, z.B.: [Übungsplan - Kernwort "Nochmal"](#)
- „Grundlagen“ zum Kernwörter lernen:

[Hier herunterladen](#)



Videothek

Schulungsvideos "TD Snap"

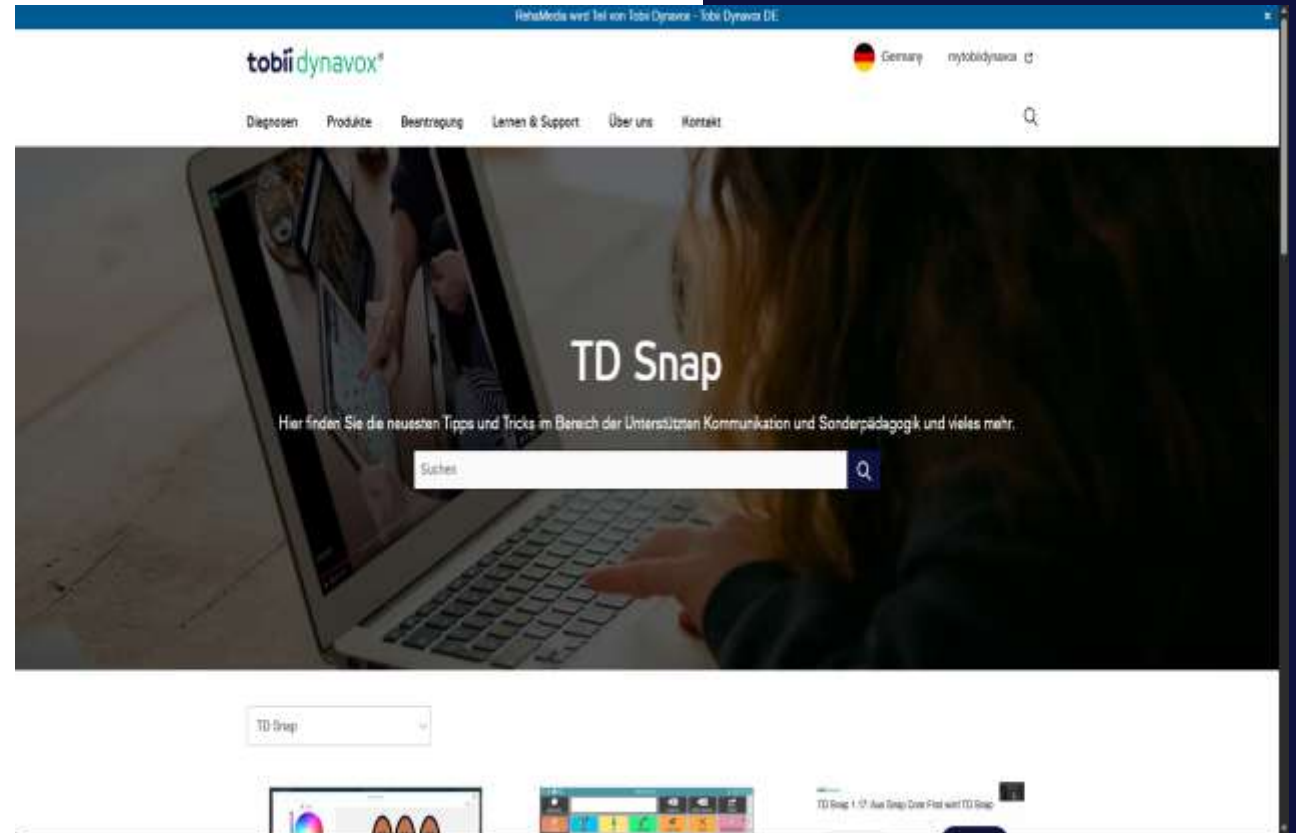


Lernkarten:



Basic Lernkarten



Lernkarten Motor Plan in TD Snap

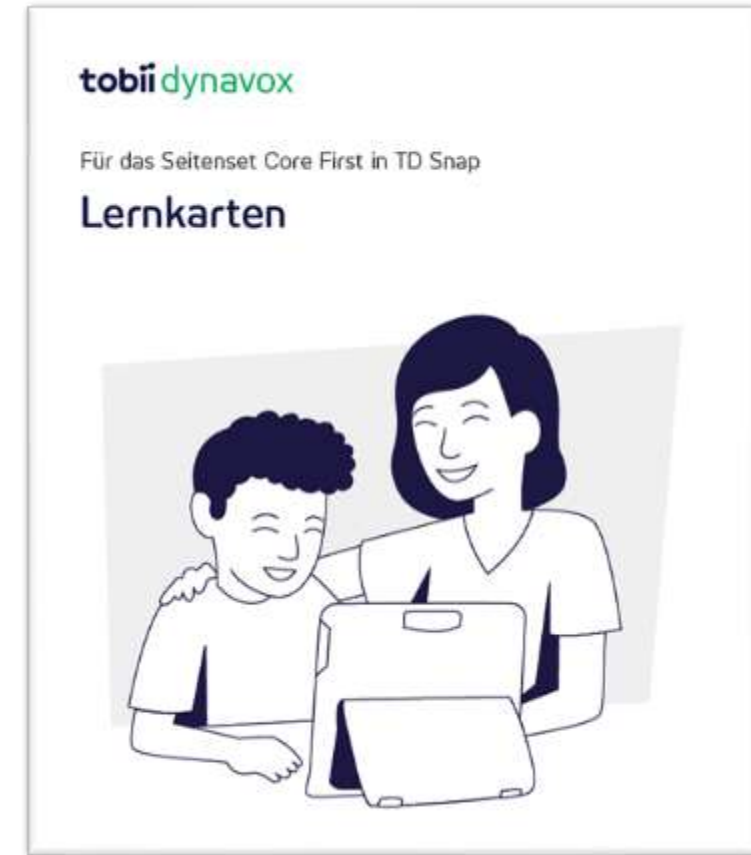

Lernkarten Core First in TD Snap

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!

tobii
dynavox



info.dach@tobiidynavox.com



- <https://de.tobiidynavox.com/>